




Predictable 6

Bruger håndbog




1. Det grundlæggende i Predictable

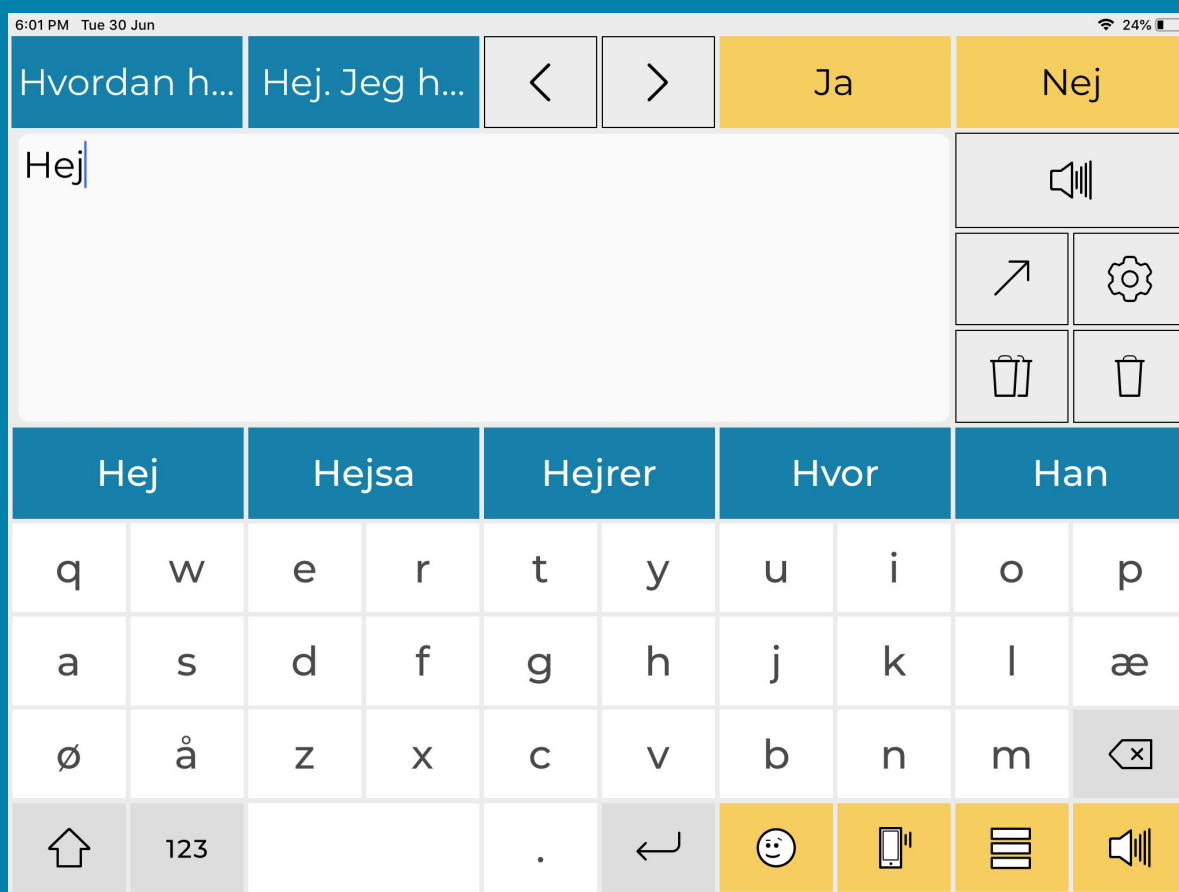

1.1. Om Predictable

Predictable er udviklet til mennesker, der har brug for støtte til kommunikationen som følge af en hjerneblødning/blodprop, progredierende neurologiske lidelser som ALS, spasticitet, hjerneskade, laryngectomerede med flere. Predictable er udviklet med henblik på mennesker, der kan læse og skrive, men som ikke har mulighed for at bruge tale.

Begynd at skrive i Predictable, og du vil opleve, at programmet vil forudsige, hvad du vil skrive, og give dig mulighed for at få udtalt det skrevne. Predictable giver en stemme til mennesker, der ikke har en!

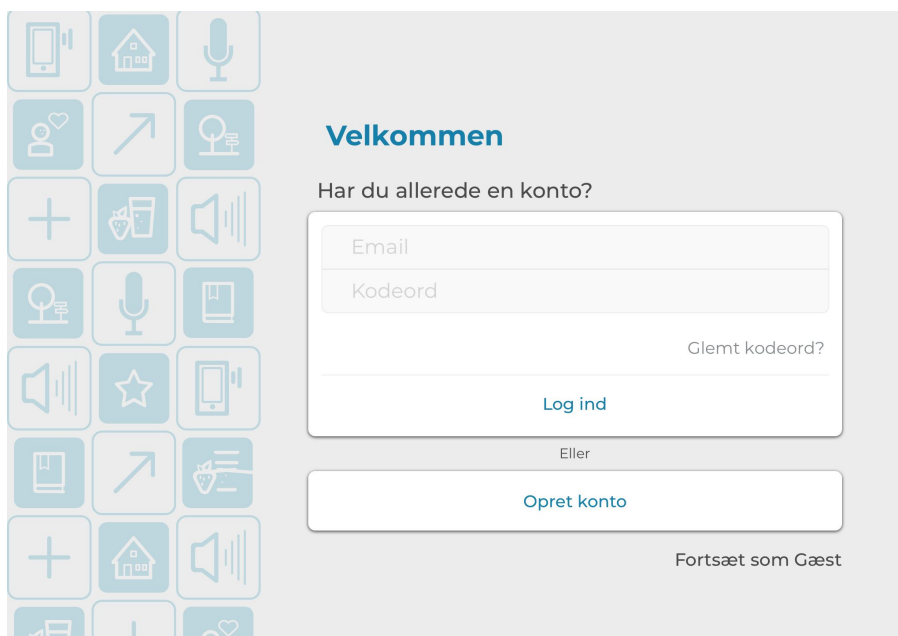

The screenshot shows the Predictable application interface. On the left is a vertical grid of 24 icons representing various functions like home, search, voice, and settings. The main area is titled 'Velkommen' (Welcome). Below the title is the question 'Har du allerede en konto?' (Do you already have an account?). There are two input fields for 'Email' and 'Kodeord' (Password). A link 'Glemmt kodeord?' (Forgot password?) is next to the password field. A 'Log ind' (Login) button is below the fields. Below the login button is the text 'Eller' (Or). Below that is an 'Opret konto' (Create account) button. At the bottom right is the text 'Fortsæt som Gæst' (Continue as Guest).

1.2 Top Features

Der er mange forskellige måder at drage nytte af funktionerne i Predictable; nogle af funktionerne bruges dog hyppigere end andre. Her er, hvad vi betragter som Predictables væsentligste funktioner:

1. Historiklinje: giver hurtig adgang til dine senest talt beskeder.
2. Favoritliste: giver hurtig adgang til dine mest almindeligt anvendte sætninger
3. Ordprædiktionslinjen: giver en effektiv forudsigelse af næste ord, hvad der giver dig mulighed for at konstruere dine beskeder meget hurtigt.
4. Funktionstaster: giver dig mulighed for let adgang til en lang række nyttige funktioner.
5. Kategorier: giver dig mulighed for at gemme relevante sætninger i kategorier.
6. Sætninger: giver dig mulighed for at hurtigt at få udtalt gemte sætninger.



1.3 Åbne appen første gang

Hvis du ikke allerede har Predictable, skal du installere appen. Når du er færdig, skal du logge ind med dine kontooplysninger. Hvis du ikke har en konto, kan du enten oprette en eller gå ind i appen via Gæstetilstand.


Nogle vil allerede have brugt tidligere versioner af Predictable. I dette tilfælde kan brugeren blot opgradere fra Predictable 5 til Predictable 6. Hvis din enhed er kompatibel, skal du opdatere appen fra App Store.

Sådan opdateres Predictable på iOS:

1. Åbn App Store.
2. Hvis du bruger iOS 12 eller tidligere, skal du trykke på I dag nederst på skærmen. Hvis du bruger en nyere version, skal du trykke på dit profilikon øverst på skærmen.
3. Rul ned for at se afventende opdateringer. Tryk på Opdater ud for Predictable for at få den seneste version.

1.4 Skriv og få udtalt din første besked

Når du først åbner Predictable, er det sandsynligt, at du vil være ivrig efter at lave din første meddelelse. For at gøre dette er der et par trin, der skal gennemgås først.

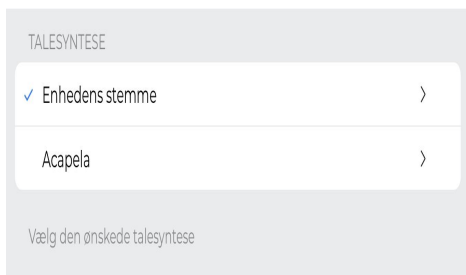


Hvis du er en ny bruger, er standardstemmen Sara. Hvis du ikke mener, at Sarastemmen er den bedste til dig, kan du vælge mellem andre stemmer i afsnittet Tale under Indstillinger. Hvis du havde Predictable 5, vil den stemme, du brugte der, være din standardstemme i Predictable 6.

Når du er tilfreds med dit valg, skal du gå tilbage til brugertilstand. Brug tastaturet til at skrive en meddelelse. Når du begynder at skrive, vil det skrevne vises i meddelelsesvinduet. Når du er klar til at tale beskeden, skal du trykke på det gule ikon for tale, der kan findes både til højre for meddelelsesvinduet og i nederste højre hjørne af dit tastatur.



Hvis dette er en sætning, som du forventer at bruge ofte, f.eks. 'Hvordan har du det?', kan du gemme den som en færdig sætning. Når du har en sætning, der er gemt, kan du slippe for at skulle skrive den hver gang du vil sige den.

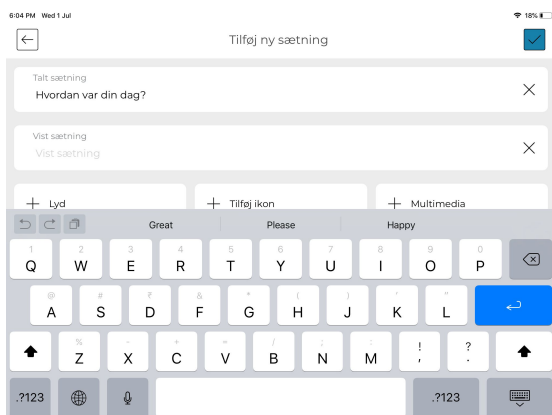

Du tilføjer en sætning ved at trykke på ikonet for Kategorier og Sætninger, som du finde lige over Tal-ikonet på tastaturet. Klik på den kategori, der bedst passer til din sætning, og tryk derefter på redigeringsikonet. Tryk på Tilføj sætning, som fører dig til en side, hvor du kan oprette din sætning. Du kan tilføje tekst til både den talte og den viste sætning, optaget lyd, et ikon og et link til multimedie.

2. Gæst vs Predictable Konto



2.1 Gæst

En måde du kan tilgå Predictable er via Gæstetilstand. I Gæstetilstand gemmes dine data lokalt på din enhed. Det betyder, at hvis du ønsker at ændre eller bruge en anden enhed, vil du ikke være i stand til at gendanne dine indstillinger, sætninger og multimedier fra den oprindelige enhed. Endvidere vil du ikke kunne gendanne dine tilpasninger, hvis du oplever datatab.

I Gæstetilstand giver Predictable information om det antal gange, du har brugt appen til tale, antallet af kategorier og sætninger du har, og den gennemsnitlige sætningslængde

PERSONLIG STATISTIK	
Tale	0
Kategorier	undefined
Sætninger	107
Gennemsnitlig sætningslængde	3.5

Data der kun er tilgængelige på denne enhed
Først brugt på 30. jun. 2020

Konverter til fuld bruger >

Alle dine eksisterende tilpasninger overføres til din nye konto, hvis du konverterer til en fuld bruger.

Hvis du vil gå fra Gæstetilstand til at have en brugerkonto, skal du trykke på Konverter til fuld bruger. Konvertering til en fuld bruger overfører din aktuelle tilpasning til din nye Predictable konto. For at konvertere til en fuld bruger skal du indtaste dit navn, e-mail og den ønskede adgangskode. Du skal aktivere din nye konto ved at klikke på det link, der er sendt til din e-mailadresse.

Du har også muligheden for at nulstille dine *indstillinger* og *Sætningsbank*. Det vil gendanne alle dine indstillinger eller Sætningsbank til deres standardværdier.

Gendanner indstillingerne til standard
Gendan alle indstillinger til standardværdierne
Gendanner sætningsbanken til standard
Gendan din sætningsbank til standard og fjern alle personliggjorte tilpasninger.

Endelig har du mulighed for at forlade Gæstetilstand. Hvis du vælger det, får du mulighed for at logge ud af Gæstetilstand og vende tilbage til Predictables login skærm. Hvis du gør det uden at konvertere til en fuld bruger, vil alle dine Predictable data gå tabt.

2.2 Predictable Konto

Du kan også oprette en Predictable konto. En Predictable konto gør det muligt at sikkerhedskopiere dine data (indstillinger, kategorier, sætninger og multimedia) automatisk til skyen, når du er tilsluttet WiFi. Det giver dig mulighed for at bruge din Predictablee konto på flere enheder. Et af formålene med en Predictable konto er at sikre brugerens data og at tilbyde muligheden for at bruge Predictable på alle de kompatible enheder, som brugeren har.

Derudover har du mulighed for at logge ind på Predictable 6's CMS (Content Management System) når du har en Predictable konto. CMS giver dig mulighed for at administrere dit indhold fra webplatformen. Funktionerne og fordelene ved CMS er beskrevet mere detaljeret i sektionen Webplatform i brugervejledningen.

PERSONLIG STATISTIK	
Tale	0
Kategorier	undefined
Sætninger	107
Gennemsnitlig sætningslængde	3.5



Predictable vil også give oplysninger om det antal gange, du har brugt appen til at tale, antallet af kategorier og sætninger du har, og den dato, hvor du sidst brugte appen.

Som i gæstetilstand har du muligheden for at nulstille dine indstillinger og sætningsbank til standard.


Endelig har du muligheden for at logge af en Predictable konto. Gør du det, vender du tilbage til skærbilledet Predictable login. I modsætning til i gæstetilstand mister du dog ikke dine data ved at gøre det.

2.3 Brug på flere enheder

Et andet udbytte af en Predictable konto er, at du kan bruge denne konto på tværs af flere platforme. For eksempel kan du logge ind på din Predictable konto på to enheder. Det betyder, at ændringer foretaget på en enhed afspejles på alle øvrige. Hvis du f.eks. har oprettet en ny sætning på din iPad, vil du også kunne se den på din iPhone, hvis du er logget ind med samme konto der. Dette sparer dig for at skulle gentage alle dine tilpasninger på flere enheder.

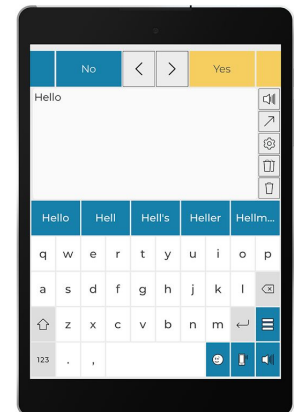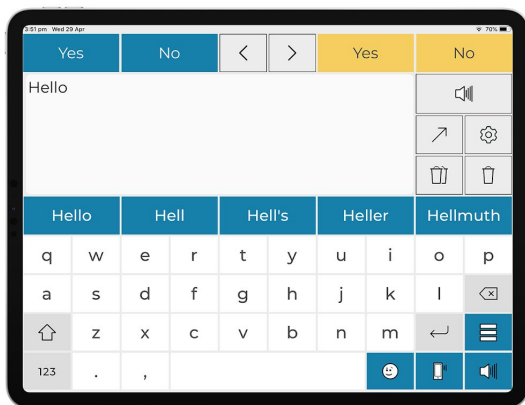

3. Brugertilstand

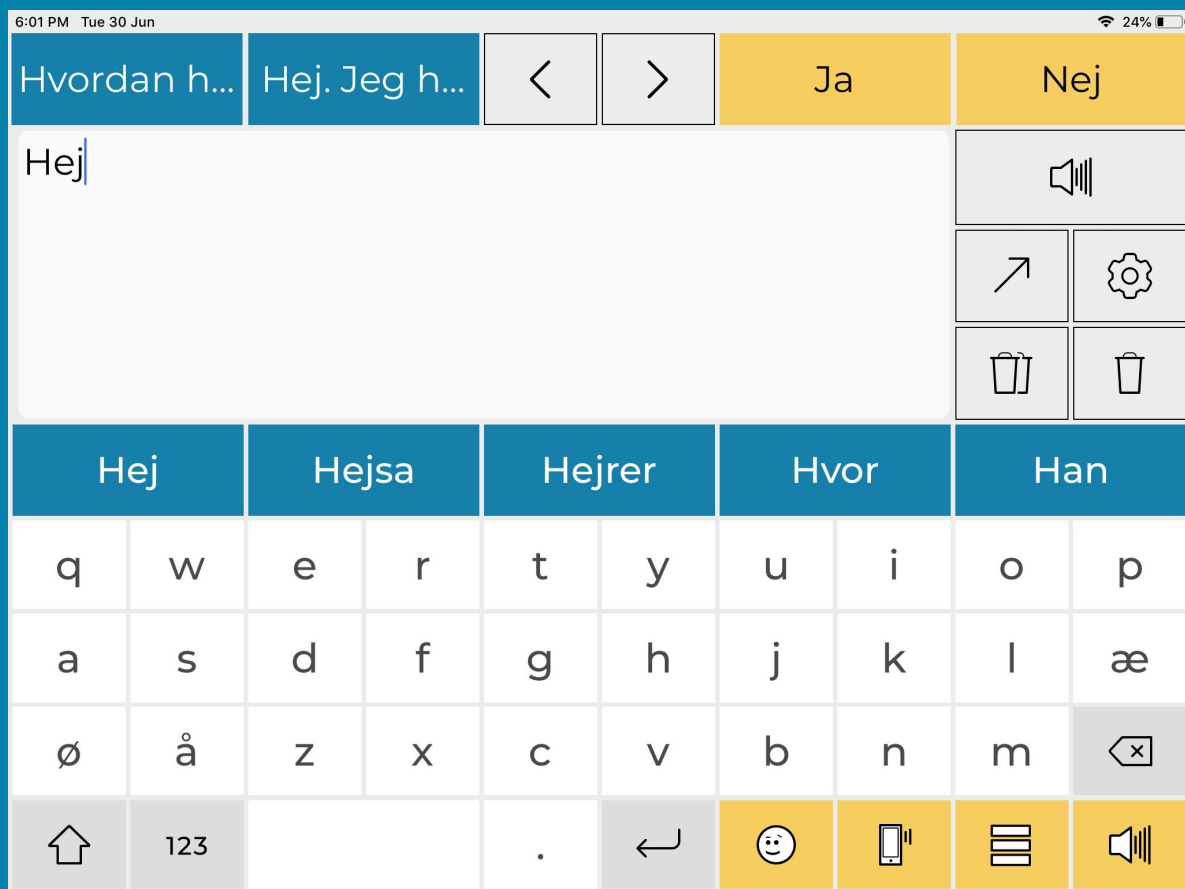

3.1. Historik, Favoritter, og Meddelelsesvindue

En af Predictable 6's nye muligheder er, at din historie og foretrukne sætninger er gjort meget let tilgængelige ved at placere dem øverst i brugertilstand. Historikslinjen indeholder alle dine tidligere udtalte sætninger og kan findes i øverste venstre hjørne af brugerfladen. Fordelen ved at have historiklinjen er, at du har mulighed for at gentage en sætning, du har sagt tidligere, og det er naturligvis især nyttig i en situation, hvor du skal gentage noget.

Hvordan h... Hej. Jeg h... <

> Ja Nej

Favoritlinjen indeholder alle sætninger i din favoritkategori. Den findes i øverste højre hjørne af brugerens skærm. Du kan scrolle fra venstre til højre for at få adgang til alle de sætninger, du har gemt i din favoritkategori. Denne funktion giver hurtig adgang til dine ofte brugte udsagn.


Meddelelsesvinduet er det sted, hvor den skrevne tekst vises. Dette giver dig mulighed for at gennemse det skrevne, før du får det sagt højt.

Hej

3.2. Funktionstaster

Funktionstasterne er let adgang til funktioner, som du kan anvende i din kommunikation. Der er 12 funktionstaster:

- A. Aarm: afspiller en valgt lyd når den trykkes på. Denne lyd kan enten være en lydoptagelse eller kan vælges fra Predictables eksisterende alarmlyde. Denne funktion er god til at gøre opmærksom på, at du har brug for hjælp.
- B. Del: giver dig mulighed for at dele din besked på flere kommunikationskanaler, f.eks. Facebook, e-mail osv.
- C. Indstillinger: fører dig til indstillinger.
- D. Slet: sletter sidste tegn i meddelelsesvinduet.
- E. Tal eller Vis: oplæser teksten i meddelelsesvinduet med den stemme, brugeren har valgt, eller viser teksten i dit meddelelsesvindue på hovedet, så din samtalepartner kan læse meddelelsen.
- F. Opkald: giver dig mulighed for at ringe til en af de kontaktpersoner, du har indtastet i afsnittet Opkald under Indstillinger. Yderligere oplysninger om funktionaliteten findes i afsnittet Opkald i denne brugervejledning.
- G. Slet alt: fjerner al tekst fra meddelelsesvinduet
- H. Slet sidste ord: fjerner det sidste ord fra meddelelsesvinduet
 - I. Håndskrift: giver dig mulighed for at håndskrive dine beskeder
- J. Sætningsbank: vil tage dig til din sætningsbank
- K. Gittervisning: fører dig til Predictables gittervisning
- L. E-mail: sender indholdet af dit meddelelsesvindue som en e-mail

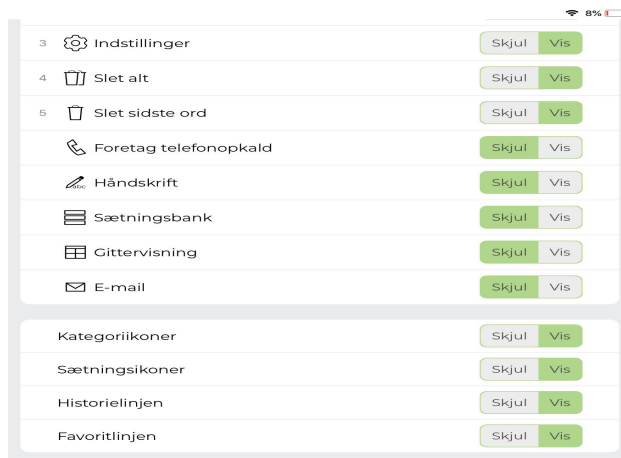


3.3 Ordprædiktation, Tastatur & Muligheder


En af Predictables vigtigste funktioner er den avancerede selvlærende Ordprædiktation. Ordprædiktation bruger brugerens indtastninger, kontekst fra tidligere ord og brugerens eget ordforråd for at give nøjagtige forudsigelser. Den selvlærende funktion er intuitiv og lærer af dit sprogbrug, gemmer ukendte ord og lærer brugerens foretrukne grammatik og syntaks. Ordprædiktionen finder du lige over tastaturet.

Et andet element i brugertilstanden er tastaturet. Predictable tilbyder 5 forskellige indbyggede tastaturer og giver dig også mulighed for at tilslutte et eksternt tastatur via Bluetooth. Funktionerne for de forskellige tastaturindstillinger er beskrevet i Tastaturafsnittet i brugervejledningen.

Udover at bruge tastaturet til at indtaste din besked, kan en række andre funktioner findes på tastaturet. "Der arbejdes" funktionen er også placeret på tastaturet. "Der arbejdes" er en funktion, der siger forudbestemte sætninger højt. Det kan være tidskrævende at skrive længere meddelelser, så denne funktion kan bruges til at gøre din samtalepartner opmærksom på, at du er i gang med at skrive en meddelelse. Du kan i afsnittet "Der arbejdes" i brugervejledningen se hvordan.

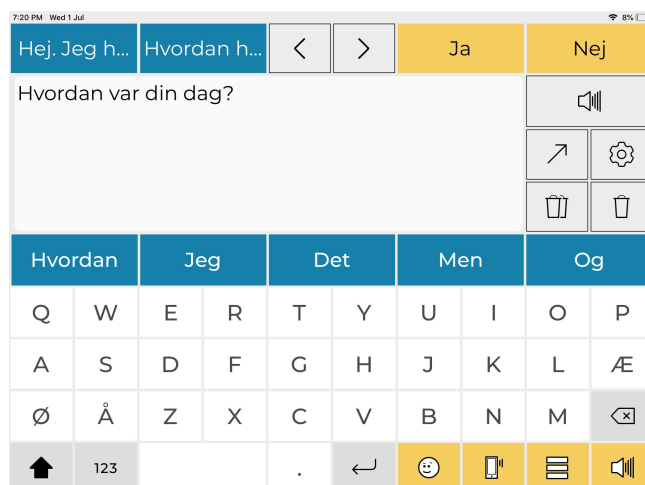

4. Et dyk ned i Sætningsbanken

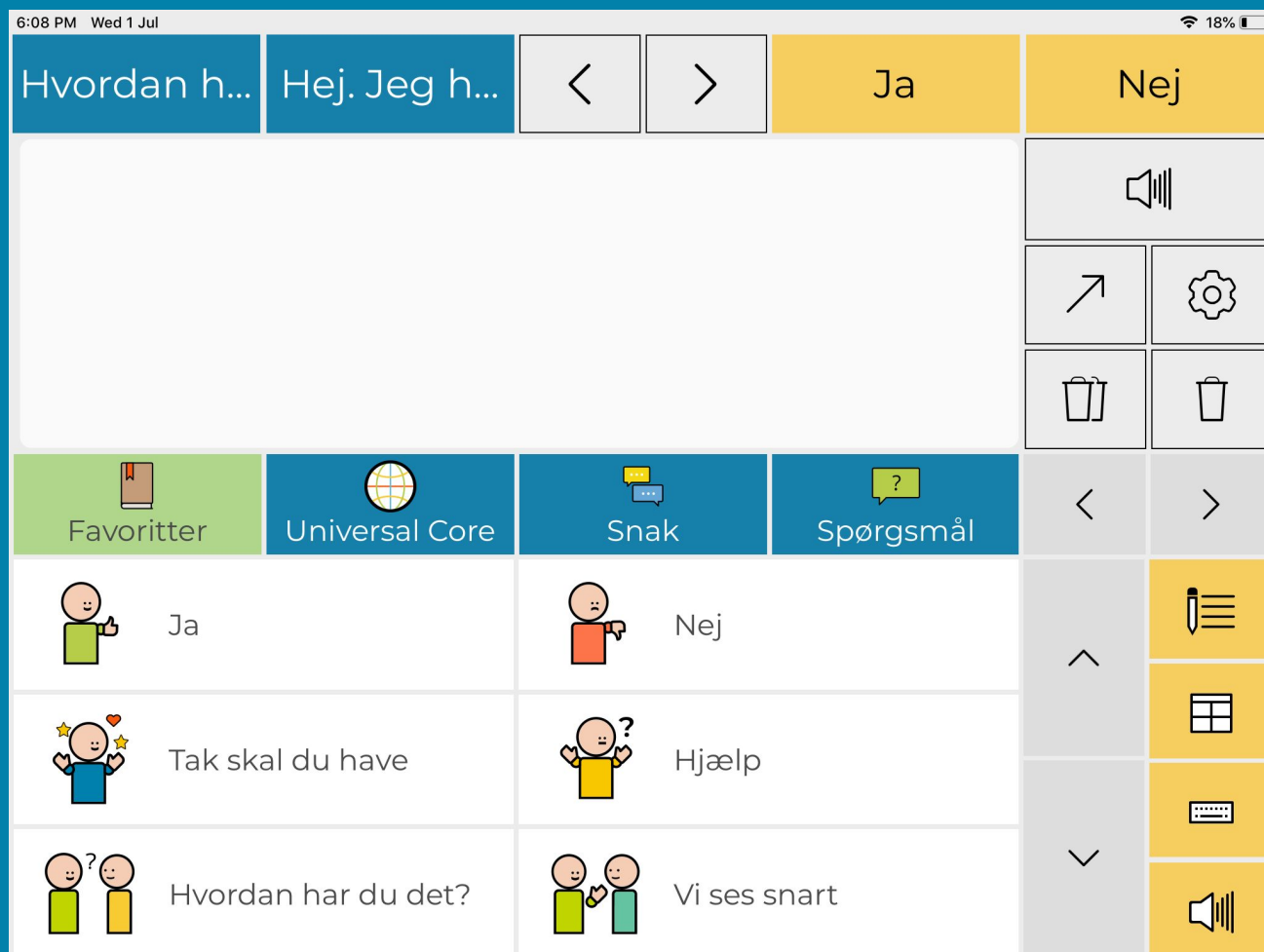


4.1 Kategorier og individuelle tilpasninger

Kategorier bruges til at gemme og organisere sætninger relateret til et specifikt emne. Det muliggør, at forhåndsforemstillede sætninger arrangeres på en logisk og let tilgængelig måde. Predictable har 14 forhåndsdefinerede kategorier, men du har mulighed for at tilføje, redigere, flytte og slette kategorier.

For at tilpasse dine kategorier skal du gå til kategorier og trykke på redigeringsikonet helt til højre (blyanten). Der er tre måder, hvorpå du kan tilpasse dine kategorier:

- A)** Tilføj kategori: Hvis du vil tilføje en ny kategori, skal du trykke på Tilføj kategori, som kan findes længst til venstre. Her kan du skrive navnet på kategorien og indsætte det billede du ønsker at bruge. Du kan bruge et foto fra de eksisterende ikoner i Predictable, fra enhedens fotogalleri eller du kan tage et nyt foto.
- B)** Rediger kategori: Du kan redigere både navn og ikon for en kategori. For at gøre dette skal du trykke på redigeringsknappen (blyanten) og derefter på den kategori, du vil redigere
- C)** Slet kategori: Du kan slette uønskede kategorier. For at gøre dette skal du trykke på redigeringsknappen (blyanten) og derefter på den kategori, du vil slette.

Der er tilføjet en ny kategori til Predictable i denne seneste udgave: Universelt Ordforråd, som er meget nyttige enkeltord, der kan bruges alene eller i kombination til at kommunikere i mange forskellige sammenhænge for at gøre kommunikationen så effektiv som muligt.

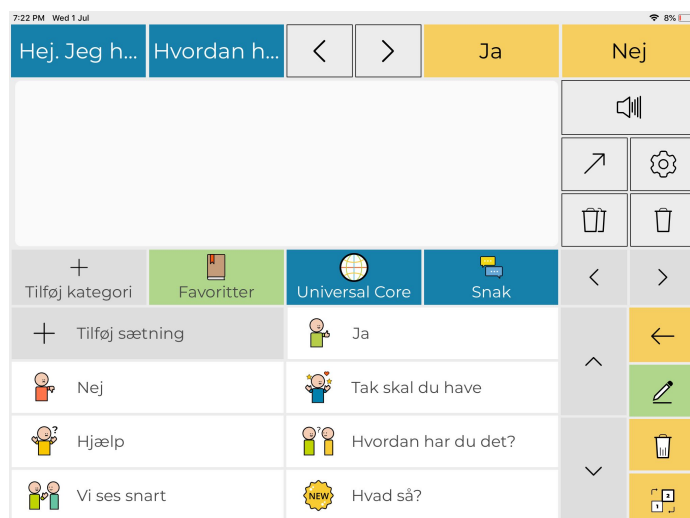


4.2. Tilpasning af sætninger


Inden for hver kategori kan du oprette og gemme så mange sætninger, som du vil. Fordelen ved at have færdige sætninger er, at det sparer dig for arbejdet med at skrive sætninger, du bruger ofte.

Hvis du vil redigere dine sætninger, skal du stå i den kategori, hvor du vil foretage ændringer. Tryk så på redigeringsikonet (en blyant) helt til højre. Der er tre måder, hvorpå du kan tilpasse dine kategorier:

- A)** Tilføj sætning: For at tilføje en sætning skal du som sagt først vælge den kategori, hvor du vil gemme sætningen. For at tilføje en sætning skal du trykke på redigeringsikonet og derefter tilføje sætning. Her kan du skrive den tekst, der skal vises og om ønsket en anden tekst, der skal udtales ved valg; om du vil optage lyd til sætningen eller bruge tekst-til-tale; om der skal være et billede på knappen og om der skal tilknyttes et multimedie.
- B)** Slet sætning: På højre side af tastaturet skal du trykke på redigeringsknappen. Tryk på den sætning, du gerne vil slette, og tryk derefter på ikonet for skraldespand.
- C)** Rediger sætning: Du har også muligheden for at redigere en sætning. Tryk på redigeringsknappen til højre på tastaturet. Tryk på den sætning, du gerne vil redigere, og rediger sætningens indhold

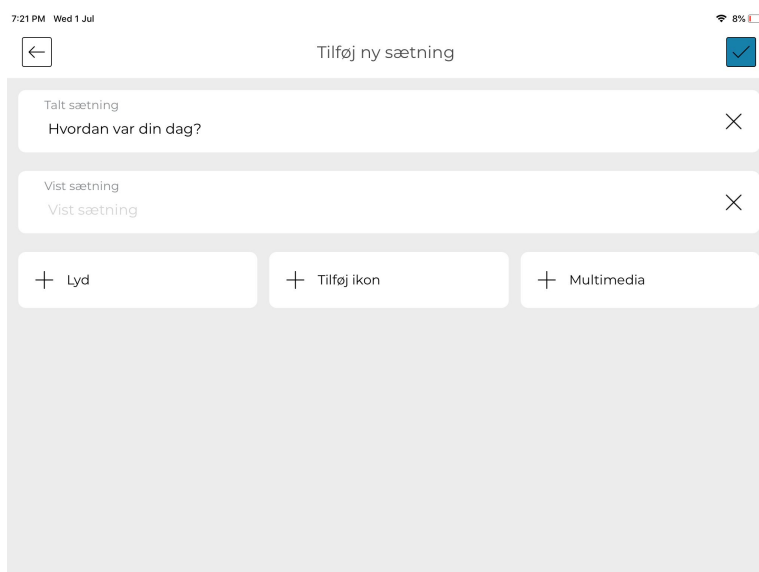

5. Tale

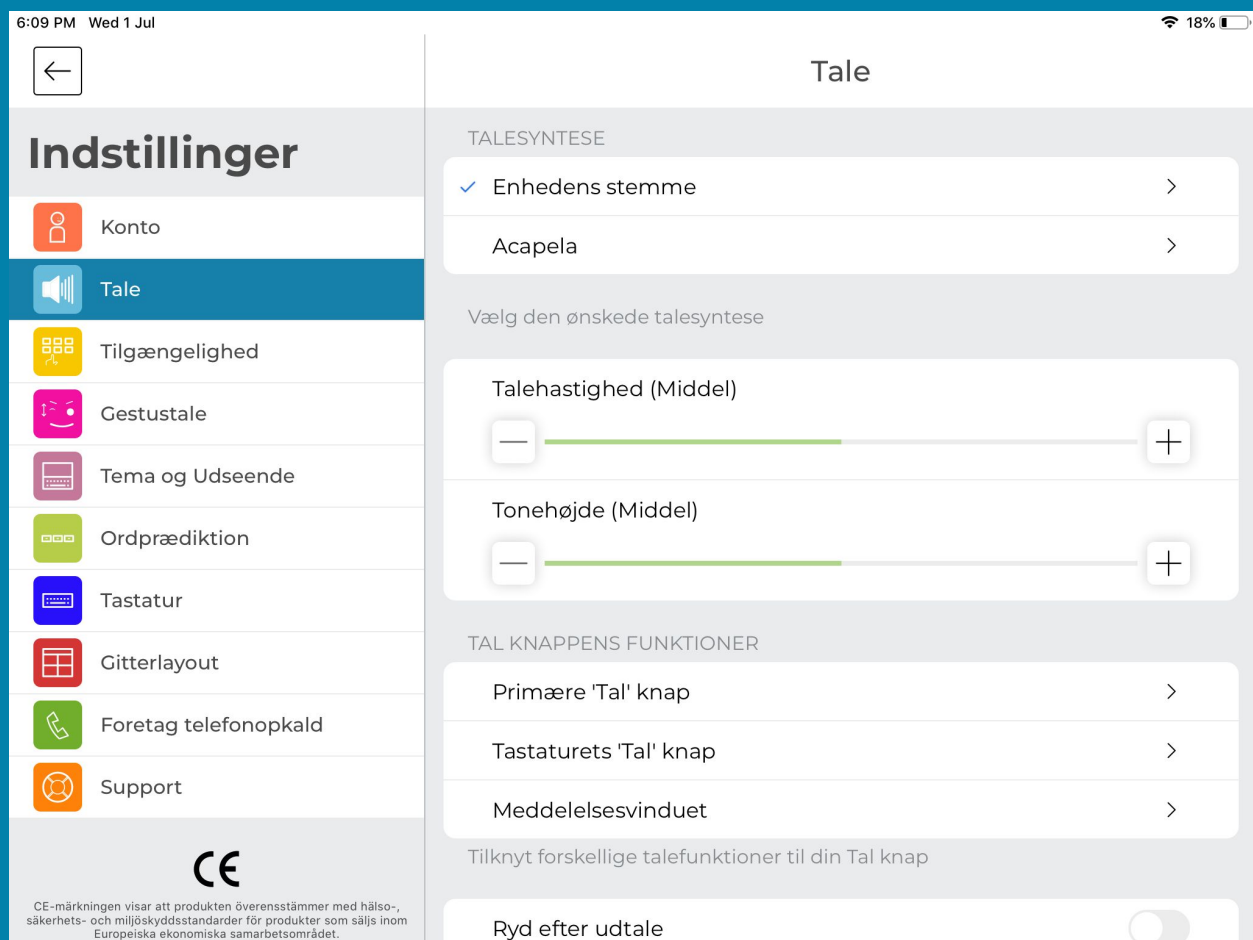


5.1. Bruge enhedens stemme

I Predictable 6 kan du vælge en af de 2 tilgængelige syntetiske stemmer: Enhedens stemme (iOS) og Acapela. Du kan vælge kvinde- eller mandestemme.

Enheds stemmer


Enhedsstemmer er de stemmer, der følger med din iPad/iPhone. Nogle stemmer er allerede downloadet og klar til brug, andre skal hentes først. Du klikke på stemmens profil for at høre en prøve.

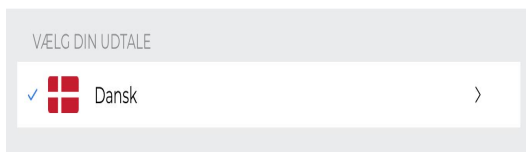

Hvis du ikke er tilfreds med de stemmer der findes, kan du downloade yderligere stemmer fra dine enhedsindstillinger. Når de er hentet, vil du kunne bruge dem i Predictable.

Download af ekstra stemmer fra enhedsindstillingerne:

Gå ud af Predictable ved at trykke på enhedens hjemknap (eller swipe op på iPad pro). Vælg indstillinger og skriv "Stemmer" i søgefeltet. Tryk på "Stemmer" og vælg Dansk. De stemmer du ser, findes i 2 forskellige kvaliteter. Klik i listen over stemmer på den stemme, du vil hente. Når den er downloadet, vil den være tilgængelig og klar til brug.

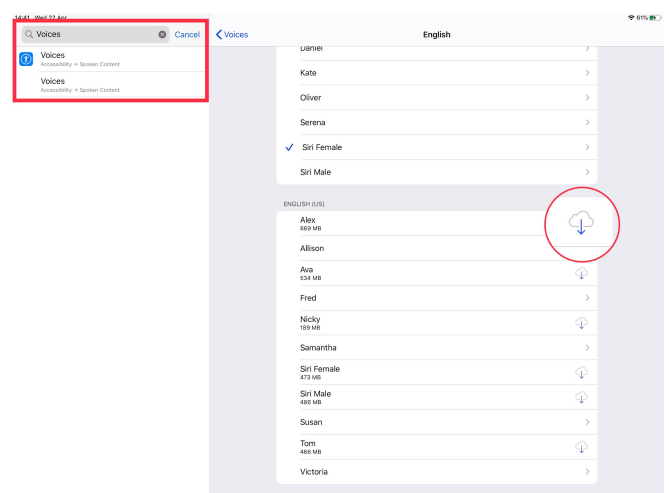


5.2. Brug stemmer fra Acapela

Acapela

- Acapela er et firma, der leverer personliggjorte digitale stemmer fra deres My-Own-Voice (MOV) stemmeservice. Brug af en Acapela MOV giver brugerne mulighed for at kommunikere med en unik personlig syntetisk stemme..
- Hvis du vil hente en Acapela MOV demo-stemme, skal du åbne appens taleindstillinger, vælge Acapela som syntetisk stemme og vælge en af de tilbudte stemmer.
-
- For at oprette din egen Acapela MOV-stemme, skal du lave nogle stemmeoptagelser for at få opretten en syntetisk stemme på baggrund af optagelserne. For at gøre dette skal du følge disse trin:
- Ansøg om 'My-Own-Voice online-tjenesten:
- <https://mov.acapela-group.com/start-now/>
- Optag de sætninger, der kræves, i dit eget tempo
- Lyt til din stemme i Type and Talk delen
- Når du er tilfreds, kan du beslutte, om du vil købe deres tjenester.
- Find mere information om priserne på deres hjemmeside:
- <https://mov.acapela-group.com/pricing/>
-


Når du har afsluttet optagelserne, vil du være i stand til at downloade stemmen til Predictable. For at downloade din Acapela MOV skal du indtaste dit Acapela brugernavn og adgangskode og trykke på download. Når den er downloadet, vil du kunne bruge stemmen i appen.

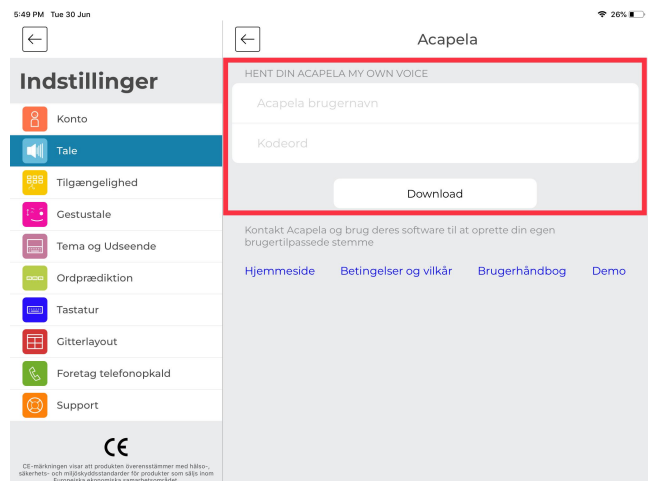

5.2 Tal-knappernes funktioner

Tal-knappernes funktioner handler om de forskellige måder, du kan bruge tale-knappen. Der er tre forskellige funktioner: Kommunikationsform, Tale handlinger og afbrydelse af Tale. Du kan tildele separate funktioner til den primære tale-knap, tastaturets taleknap og til meddelelsesvinduet. Når meddelelsesvinduet er aktiveret som tal-knap,, aktiveres talefunktionen ved at trykke på meddelelsesvinduet. Bemærk at aktivering af dette vil deaktivere alle andre mulige interaktioner med meddelelsesvinduet, såsom at flytte markøren, kopiere, indsætte osv.

Kommunikationstype henviser til, om knappen enten vil vise eller tale din meddelelse. Hvis du aktiverer medtager funktionen “Vis”, vil teksten, når du senere trykker på knappen Vis, rotere teksten 180 grader, så den kan læses af den, der sidder over for dig. Funktionen Tal oplæser din meddelelse, når du trykker på knappen.

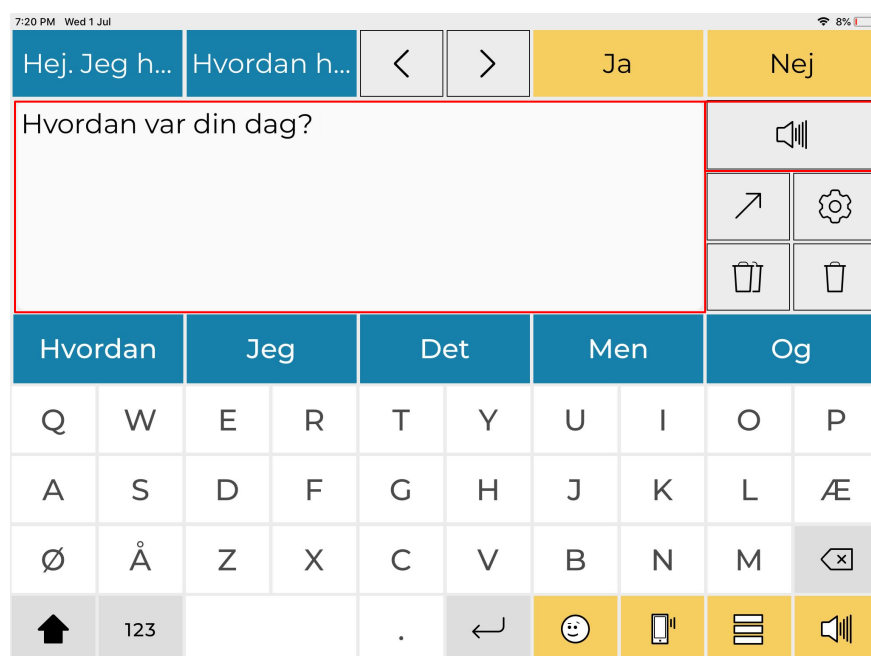



Tal-interaktion bestemmer, hvordan din meddelelse vil blive talt, når du trykker på den. Der er 7 forskellige måder, du kan ændre muligheden for taleinteraktion på:

- **Tal alt:** hele beskeden i meddelelsesvinduet tales
- **Tal efter markøren:** teksten efter markøren vil blive udtalt
- **Tal før markøren:** teksten før markøren vil blive udtalt
- **Tal nuværende sætning:** den sætning, hvor markøren er placeret, vil blive udtalt
- **Tal sidste sætning:** kun den sidste sætning vil blive udtalt.
- **Tal ikke tidligere udtalt:** kun udtalte ord bliver talt
- **Tal nuværende sætning:** den sætning, hvor markøren er placeret, vil blive udtalt

Det er vigtigt at bemærke, kun funktionerne “Tal Alt”, “Tal nuværende sætning” og “Tal ikke tidligere udtalt” kan aktiveres ved tryk på Meddelelsesvinduet, når det er sat til at kunne bruges som “Tal-funktion” .

Finally, there are two Speak Interruptions: Stop and Pause. When the stop function is enabled, when pressed it will discontinue the entire message. If you wish to speak the same message, you will have to start from the beginning, rather than from the point where you pressed the stop button. Contrastingly, the pause function will halt the message when pressed, and will allow you to continue from this point when you press the play button. To activate either of these features, tap the speak button this Speak Interruption is assigned to.

5.3 Tilpasset Udtale og Forkortelser

Tilpasset Udtale

Denne funktion giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan bestemte ord udtales. Hvis den syntetiske stemme ikke udtaler et ord korrekt, kan du tilpasse udtalen her. Et eksempel kunne være ordet Digestive. Det vil blive udtalt som det staves, men man kan sørge for, sørge for, at det udtales “dajdjæstiv” (fonetisk udtale). Der er tre muligheder på denne side:

- A) Tilføj Udtale:** Når du tilføjer et ord, der skal udtales på en anden måde, skal du skrive ordet som det staves og dernæst den ønskede fonetiske udtale.
- B) Rediger en eksisterende Tilpasset Udtale:** tryk på det ord, du vil redigere, og vælg derefter rediger-ikonet i øverste højre hjørne af skærmen.
- C) Slette en eksisterende Tilpasset Udtale:** tryk på det ord, du vil slette, og vælg derefter slet-ikonet i øverste højre hjørne af skærmen.


Forkortelser

For at hjælpe dig med at skrive beskeder hurtigere giver Predictable dig mulighed for at oprette dine egne forkortelser. For eksempel kan du oprette forkortelsen MVH, som så skriver Med Venlig Hilsen. Hvis du derefter skriver MVH i meddelelsesvinduet, vil Predictable skrive denne sætning.


For at oprette Forkortelser skal du gå til Indstillinger og vælge Tale. Her går du ned i bunden og vælger Brugeroprettet forkortelse. Du kan administrere dine forkortelser på tre måder:

- 1) Tilføj ny: for at tilføje en ny forkortelse.
- 2) Slet forkortelse: tryk på den forkortelse, du vil slette, og vælg derefter slet-ikonet i øverste højre hjørne af skærmen.
- 3) Rediger forkortelse: tryk på den forkortelse, du vil redigere, og vælg derefter rediger-ingsikonet i øverste højre hjørne af skærmen.

5.4 Flere tilpasninger af tale

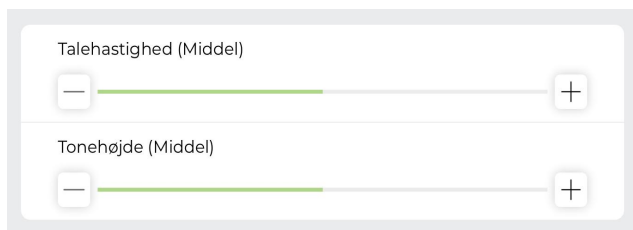


En anden mulighed, der tilbydes, er “Ryd Efter Tale”. Når denne funktion er aktiveret, vil meddelelsen blive slettet fra meddelelsesvinduet, når den er blevet talt. Dette sparer dig for at skulle slette tekst, hver gang du har fået udtalt en besked.

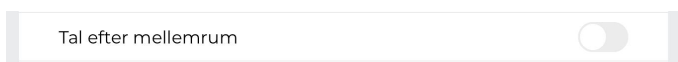

“Tal Efter Sætning”; når denne funktion er aktiveret, udtales den seneste sætning, hver gang du sætter punktum i slutningen af sætningen.

Predictable tilbyder flere forskellige måder at tilpasse udtalen på. En tilpasning kan være at justere Talehastighed og Tonehøjde. Talehastigheden kan variere fra meget langsom til meget hurtig. Tonehøjden afgør hvor høj eller dyb stemmen vil lyde. Tonehøjden kan variere fra meget lys til meget dyb.

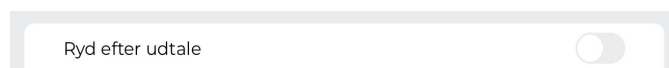

“Tal efter mellemrum” er en anden mulig indstilling. Predictable udtaler ordet efter hvert mellemrum. Denne funktion kan bruges til en mere kontinuerlig dialog.

“Marker mens du taler”, fremhæver indholdet i dit meddelelsesvindue, når det tales. Denne funktion kan eksempelvis være nyttig for brugere med hørenedsættelse, så de kan se, hvilken del af teksten, der udtales på et givet tidspunkt.




De andre tilpasninger af udtale der er mulige, relaterer sig til brug af sætninger. Du har muligheden for at aktivere eller deaktivere “Send sætninger til meddelelsesvindue” og “Udtal sætninger ved tryk”. Send sætninger til meddelelsesvindue betyder, at når du trykker på en sætning, skrives den i meddelelsesvinduet. Funktionen Udtal sætning ved tryk medføre, at sætningen blot udtales, når du trykker på den. Hvis du aktiverer begge funktioner, sendes det både til meddelelsesvinduet og udtales, når du trykker på en færdig sætning.

En ny funktion til Predictable 6 er “Udtal kategoriens navn når der trykkes”. Når denne funktion er aktiveret, udtales kategorinavnet, når der trykkes på en kategori. Denne funktion kan være nyttig for brugere med nedsat syn.

.

6. Tilgængelighed

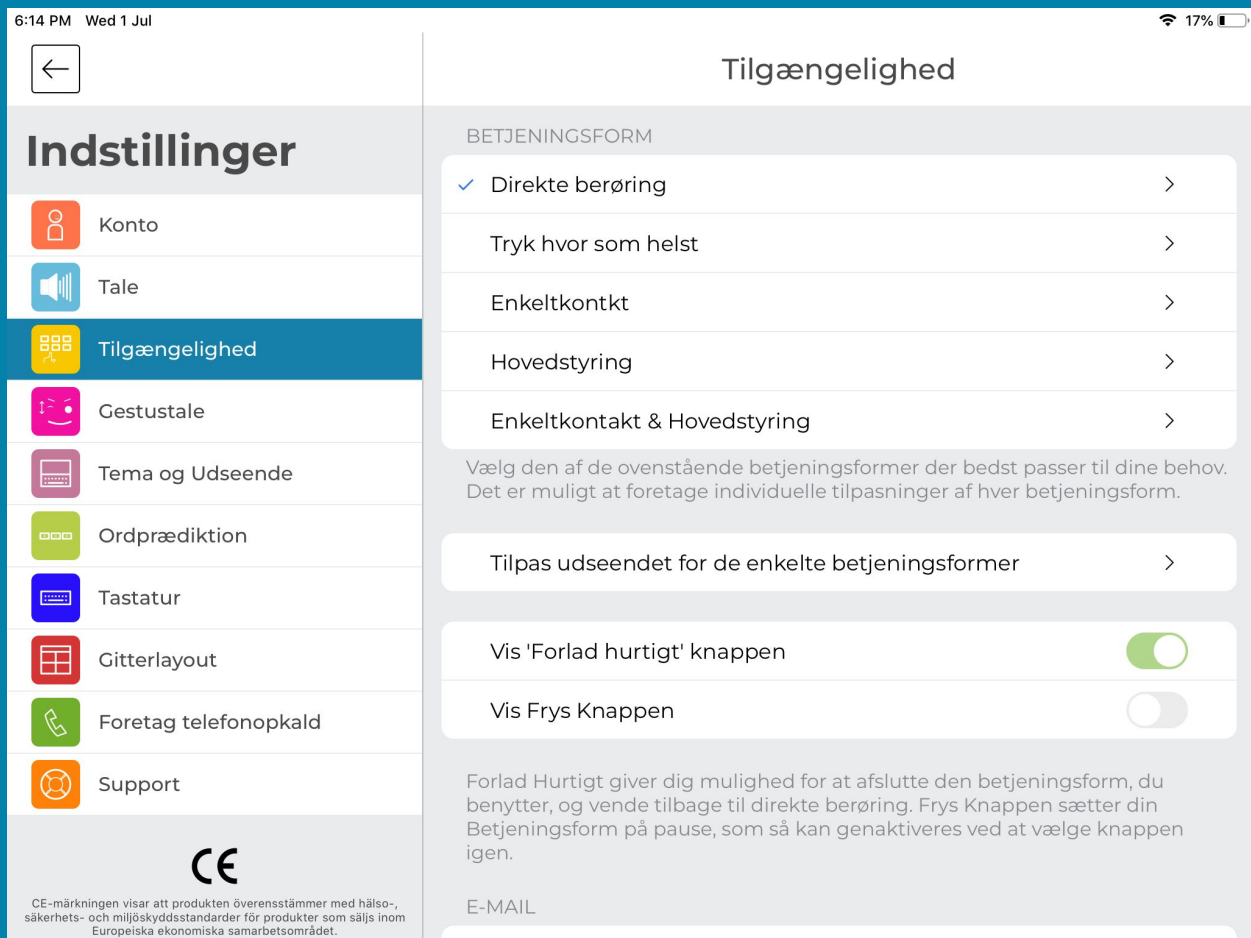

6.1 Tilgængelighed og betjening og valg

Tilgængelighed

BETJENINGSFORM	
✓ Direkte berøring	>
Tryk hvor som helst	>
Enkeltkontkt	>
Hovedstyring	>
Enkeltkontakt & Hovedstyring	>

Predictable offers 5 different Access Methods:

- 1) Direkte berøring
- 2) Enkeltkontakt
- 3) Tryk hvor somhelst
- 4) Hovedstyring
- 5) Scan and Track

De enkelte funktioner vil blive nærmere beskrevet i de følgende afsnit om tilgængelighed. Alle funktionerne har et fælles emne, der er Bevægelse og Valg. Bevægelse henviser til, hvordan du bevæger dig mellem knapper og taster på skærmen. Dette kan være Direkte berøring eller eksempelvis en markør på skærmen, der styres af dine hovedbevægelser. Valg er, hvordan du bekræfter et valg, altså udfører en aktivering af et ønsket element. Det kan være, at du trykker på skærmen, bruger en kontakt, venter mens markøren er det ønskede sted eller vælger med et ansigtsudtryk.

6.2 Direkte berøring med varighed af tryk og forsinkelse efter tryk

Som standard bruges appen med Direkte berøring. Ved Direkte berøring trykker du på den ønskede tast med din finger, hvorved valget foretages.

Der er to indstillinger der muliggør tilpasning af trykket i forhold til motoriske forudsætninger. Disse indstillinger er "Varighed af tryk" og "Forsinkelse efter tryk". De kan være meget nyttige for brugere, der oplever utilsigtet reaktion ved tryk på skærmen. Man kan kun benytte den ene af de to muligheder - ikke begge samtidigt.

Den første tilpasning er Varighed af Tryk. Når denne funktion er aktiveret, skal brugeren trykke og holde på den ønskede tast i et bestemt tidsrum for at aktivere den. En timer oplyser om den resterende tid, inden knappen aktiveres. Du kan indstille tidsforsinkelsen fra 1 til 15 sekunder ved hjælp af skyderen.

Den anden mulighed er Forsinkelse efter tryk. Hvis du aktiverer denne indstilling, låses skærmen efter det første tryk på en tast. Mens skærmen er frosset, vil berøring af skærmen ikke udløse handlinger. En timer, der kan tilpasses, oplyser dig om den resterende tid inden en ny tast kan vælges. Du kan indstille Forsinkelsen til en varighed fra 1 til 15 sekunder ved hjælp af skyderen.

IGNORER GENTAGELSER

Slå Ignorer gentagelser til ☒

Med Ignorer Tryk vil der gå et forudbestemt tidsrum før et nyt tryk på skærmen vil blive registreret. En timerfunktion oplyser dig om den ti, der er tilbage, før skærmen kan benyttes igen.

Vælg varighed før nyt tryk kan udføres. (2 Sekund)

Brug skyderen til at justere varigheden af Ignorer Tryk funktionen

Vælg Varighed af tryk ☒

Med funktion aktiveret skal du trykke på en knap ned i en forudbestemt tid før handlingen udløses. En timer viser den tid, der er tilbage, før trykket accepteres.

Vælg tid for Varighed af tryk (2 Sekund)

Brug skyderen til at justere hvor længe der skal trykkes med Varighed Af Tryk funktionen

6.3 Enkeltkontakt og Tryk hvor som helst

Enkeltkontakt og Tryk hvor som helst er begge betjeningsformer til mennesker, der ikke har motorik til at vælge med direkte berøring..

Ved Tryk hvor som helst bevæger en markør sig automatisk over skærmen, og når markøren er det sted, man ønsker at aktivere, berøres skærmen et eller andet tilfældigt sted, hvorved valget sker.

Betjeningsformen Enkeltkontakt fungerer på samme måde, altså at en markør bevæger sig over skærmen og fremhæver de enkelte elementer. I modsætning til Tryk hvor som helst kan man vælge, om markøren skal flytte sig automatisk, eller manuelt. Ved automatisk scanning skal du trykke på en kontakt, når markøren er på det ønskede område på skærmen. Ved manuel scanning benyttes to kontakter, hvor den ene bruges til at bevæge markøren, og den anden bruges til at vælge, når markøren er det rette sted.

For Enkeltkontakt og Tryk hvor som helst er der et antal tilpasninger, du kan foretage:


- 1)** Scanningshastighed: Dette bestemmer, hvor hurtigt scanneren bevæger sig fra felt til felt. Det er en funktion, der hænger sammen med automatisk scanning.
- 2)** Stop scanning: Antallet af gange markøren bevæger sig rundt i en cyklus inden scanningen stopper. Valgmulighederne er fra 1 cyklus til aldrig at stoppe. Denne funktion hænger også sammen med automatisk scanning.

Traditionel Kontaktbetjening er, som navnet antyder, traditionelt blevet brugt med enkeltkontakter til at kontrollere bevægelse og valg, men i Predictable 6 er der mulighed for at bruge et eksternt tastatur til at udføre samme handlinger som enkeltkontakterne normalt bruges til.

For at gøre brug af dette, skal du i indstillinger gå til Enkeltkontaktbetjening og vælge Kalibrer knapperne.

I dette afsnit ser du muligheden for at tildele forskellige taster på dit tastatur til Bevægelse og Valg. For eksempel kan tasten "1" bruges til bevægelse og tasten 0 til valg. Ved at trykke på tasten 1 flyttes markøren på skærmen, og tasten 0 aktiverer det, markøren står på.

Hvis du gerne vil vende tilbage til blot at bruge kontaktbokse, skal du trykke på Nulstil for at skifte til standardindstillinger. Dette findes direkte under valgmulighederne for bevægelse og valg.

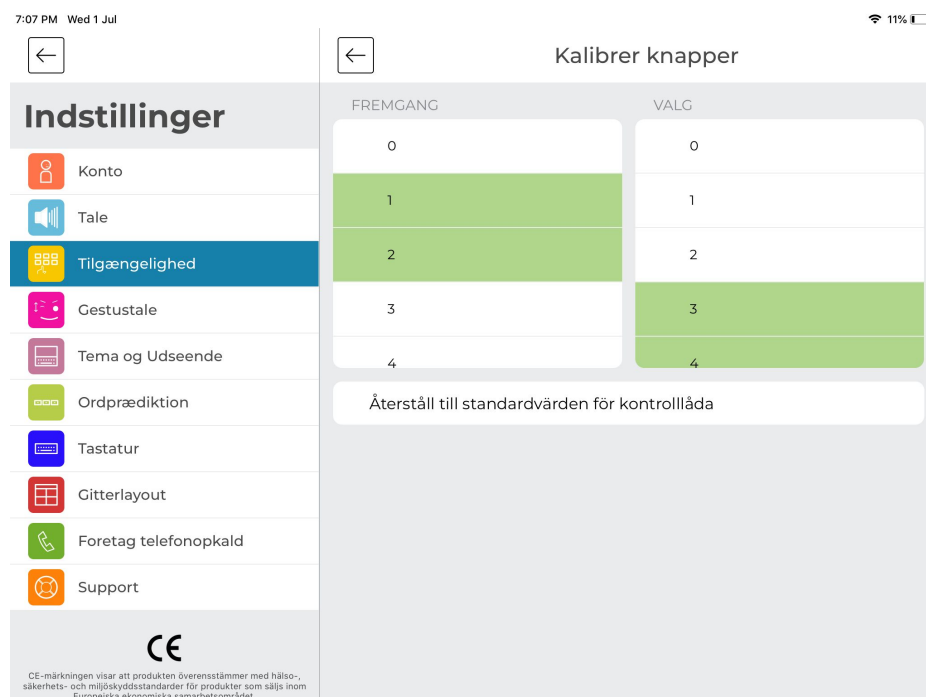

6.4 Hovedbevægelse og muligheder for valg

Styring med Hovedbevægelser er kun muligt på IOS-enheder, der har ansigtsgenkendelsessystem (iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad Pro 12,9-tommer 3. generation og iPad Pro 11 tommers. Denne funktion giver dig mulighed for at betjene Predictable ved hjælp af bevægelser af hovedet. Når funktionen er aktiveret, vil Predictable spore dit ansigt, vælge et midtpunkt, som typisk er næsen, og ved hjælp af hovedbevægelser kan man bevæge markøren rundt på skærmen.

Du kan påvirke markørens bevægelser ved at ændre følsomheden for hovedbevægelse. Der er tre muligheder for at justere følsomheden: Lav, Medium og Høj. Følsomheden afgør, hvor store hovedbevægelser der skal til for at flytte markøren en given afstand på skærmen. F.eks. kræver det en større bevægelse at flytte markøren, hvis følsomheden er lav.

En anden indstillingsmulighed er hovedets placering i forhold til skærmen. Denne indstilling har to muligheder: standard eller Kalibrér. Som standard forventer appen, at dit hoved er centreret i forhold til kameraet. De bedste resultater for standard opnås, når enhedens kamera er i øjenhøjde, enheden er monteret lige i forhold til dig i en afstand af mellem 10 cm og 100 cm. Med kalibrering kan iPad'en anbringes anderledes.

Når du trykker på Kalibrér, vil du se en kameraramme, hvor i du kan se dit ansigt. Tag et foto af din position ved at trykke på Kalibrer, og kalibreringen bestemmes på baggrund af dette foto.

For at foretage valg ved hovedstyring kan man bruge flere forskellige metoder:

- 1) **Dwell (Hold markøren stille):** Her skal du, for at vælge et element, holde markøren stille i en forudbestemt tid. Tidsrummet kan variere mellem 0,5 og 5 sekunder.
- 2) **Blink:** blink for at foretage et valg.
- 3) **Åbne munden:** valget foretages ved at åbne munden.
- 4) **Tungen ud** (kun tilgængelig i iOS 12 eller senere): For at foretage et valg skal du, når markøren er på den ønskede placering, stikke tungen ud.
- 5) **Smil:** For at foretage et valg skal du smile.
- 6) **Rynke panden:** For at foretage et valg skal du rynke panden.
- 7) **Hæve øjenbryn:** For at foretage et valg skal du hæve øjenbrynene.
- 8) **Puste kinder op:** For at foretage et valg skal du puste dine kinder op.
- 9) **Kig op:** For at foretage et valg skal du kigge op..

Som ved følsomheden for hovedbevægelser, kan følsomheden for de forskellige muligheder for at foretage valg, tilpasses. Du kan enten vælge standardfølsomheden eller kalibrere den selv. Kalibreringen kan variere fra 0,1 til 0,9, med 0,1 svarende til den højeste følsomhed og 0,9 den laveste.

Ved lav følsomhed skal din mimik være tydeligere for at foretage valget,, mens mindre følsomhed vil betyde, at mimikken kan være mindre.

Du har mulighed for at afprøve hovedstyringen og de enkelte muligheder for valg i et "spil". I dette spil skal du ved hjælp af hovedstyringen placere markøren på en firkant og vælge den ved hjælp af din valgte aktiveringsform. Firkanten flytter sig efter valg, og du kan "fange" den igen. Det giver dig mulighed for at prøve de forskellige former for såvel valg som følsomhed, før du bruger Hovedstyring i brugertilstand.


6.6 Markørens bevægelser og valg

Du har i Predictable mulighed for at kombinere strategier fra de forskellige muligheder, der findes for at flytte markøren og foretage valg. det muliggør, at du kan kombinere de metoder, der passer dig bedst .

Du har tre muligheder for alternativ bevægelse af markøren: Automatisk scanning, Manual scanning og Hovedstyring.

Der er i alt 11 muligheder i forhold til valg. Følsomheden af alle disse udvælgelsesmetoder kan tilpasses. Du kan enten vælge standardfølsomheden eller kalibrere dem selv. Kalibreringen kan variere fra 0,1 til 0,9, med 0,1 svarende til den højeste følsomhed og 0,9 den laveste.

For lav følsomhed skal din handling i forhold til at foretage et valg være mere større for at aktivere markøren, mens for mindre følsomhed vil kræve en mindre handling..

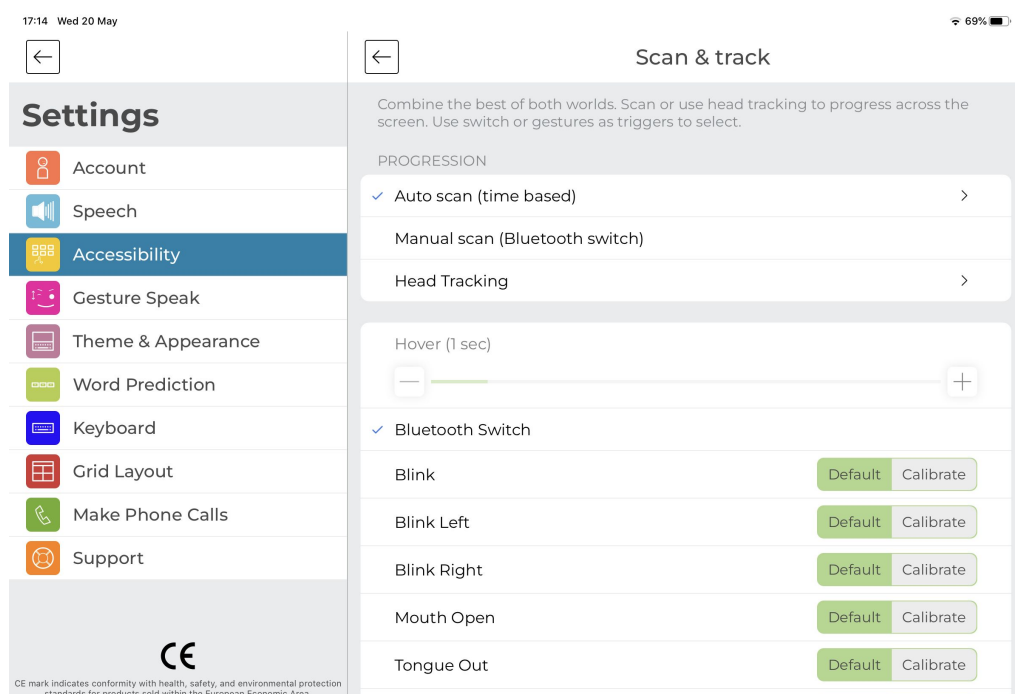

6.7 Tilpasning af scanning

Du kan justere flere forskellige ting i forhold til visuel støtte i forbindelse med din betjening, for at optimere brugen, hvis du for eksempel har en synsnedsættelse..

Der 4 tilpasninger, du kan foretage:



- 1) **Fyldfarve for målknap:** farven på det element markøren står på
- 2) **Rammefarve for målknap:** farven på den ramme der omkranser markøren
- 3) **Markør ved hovedstyring:** farven på den markør der følger dine hovedbevægelser, når du bruger hovedstyring
- 4) **Gennemsigtighed:** Afgør, hvor gennemsigtig markøren er. Meget lav giver en lys markør og Meget høj er en mørkere markør.

Forlad hurtigt knappen og Frys knappen kan bruges ved alle betjeningsformer. Forlad hurtigt giver dig mulighed for at afslutte den betjeningsform, du bruger, og gå til Direkte berøring. Frys knappen giver dig muligheden for at sætte din aktuelle betjeningsform på pause. Det kan være nyttigt, hvis du ikke har brug for at udtrykke dig på det aktuelle tidspunkt. For at genaktivere betjeningen, kan du enten trykke på knappen igen eller markere den og bruge den valgte aktiveringsmetode.

6.8 Opsætning af e-mail kontakter

Denne funktion giver dig mulighed for at sende e-mail fra Predictable. Føj din e-mail-konto til Predictable, og tilføj derefter e-mail-adresserne på dine venner, familie og kolleger, som du muligvis vil kontakte.

For at opsætte din e-mail skal du først vælge, hvilken e-mail-udbyder du vil benytte i din Predictable. Det er vigtigt, at du giver Predictable adgang i din e-mailudbyders sikkerhedsindstillinger for at kunne sende e-mails fra Predictable. Nedenfor er processen for Gmail, Yahoo og Outlook beskrevet.

For at give adgang skal du først klikke på din e-mail-udbyder. Når du klikker på dette, navigeres du ud af appen til din e-mail-udbyders sikkerhedsindstillinger. Her bliver du bedt om at give Predictable adgang til din e-mail-konto. Hvis du ønsker at sende e-mails fra Predictable, skal du give tilladelse i dette afsnit og derefter klikke på muligheden for at navigere tilbage til app'en.

Hvis du har en e-mail-udbyder, der ikke er Gmail, Yahoo eller Outlook, er processen lidt anderledes. Aktivér først indstillingen Anden e-mail-udbyder. Efter dette skal du indtaste din e-mailadresse og adgangskode og trykke på Gem detaljer.

Når dette er gjort, kan du tilføje e-mail-adresserne til dem, du gerne vil kunne sende e-mails til. For at gøre det, skal du blot trykke på tilføj modtager og derefter indtaste deres navn og e-mail-adresse. For at kunne sende en e-mail skal du først skrive en tekst i meddelelsesvinduet. Du skal have valgt, at ikonet for e-maili vises som en af dine funktionstaster. Når du har skrevet din besked, skal du trykke på e-mail-ikonet. Afhængig af den funktion, du har valgt, sendes meddelelsen enten straks til din stjernemarkerede kontaktperson, eller du kan vælge en modtager fra den viste liste.

6.9 Der arbejdes

Der Arbejdes er en funktion, hvor forud konstruerede sætninger kan udtales. Funktionen kan bruges til at gøre opmærksom på, at du er ved at skrive en længere besked.


Du har muligheden for at vælge, at Der Arbejdes funktionen udføres automatisk. Har du valgt det, vil den/de forud konstruerede sætninger blive sagt højt efter et bestemt tidsrum. Hvis det er slået fra, kan du selv aktivere funktionen ved at trykke på knappen der Arbejdes.

Hvis du har valgt Automatisk til, vil tidsrummet før sætningen udtales være bestemt under indstillinger for funktionen Der Arbejdes.

Du kan også administrere funktionen. Der er tre forskellige tilpasninger, du kan foretage.


- 1) Tilføj sætning: dette giver dig mulighed for at tilføje dine egne sætninger. For at tilføje en sætning skal du under indstillinger > Tilgængelighed > Der Arbejdes trykke på + Tilføj ny. Du kan bruge optaget lyd eller en tekst-til-tale.
- 2) Rediger sætning: du kan redigere en eksisterende sætning ved at trykke på den og derefter vælge redigeringsikonet i øverste højre hjørne af skærmen.
- 3) Slet sætning: Hvis du vil slette en sætning, skal du vælge den sætning, du vil slette, og derefter trykke på sletteikonet i øverste højre hjørne af skærmen. Man kan ikke slette alle sætninger, da der skal være mindst en.

7. Udseende

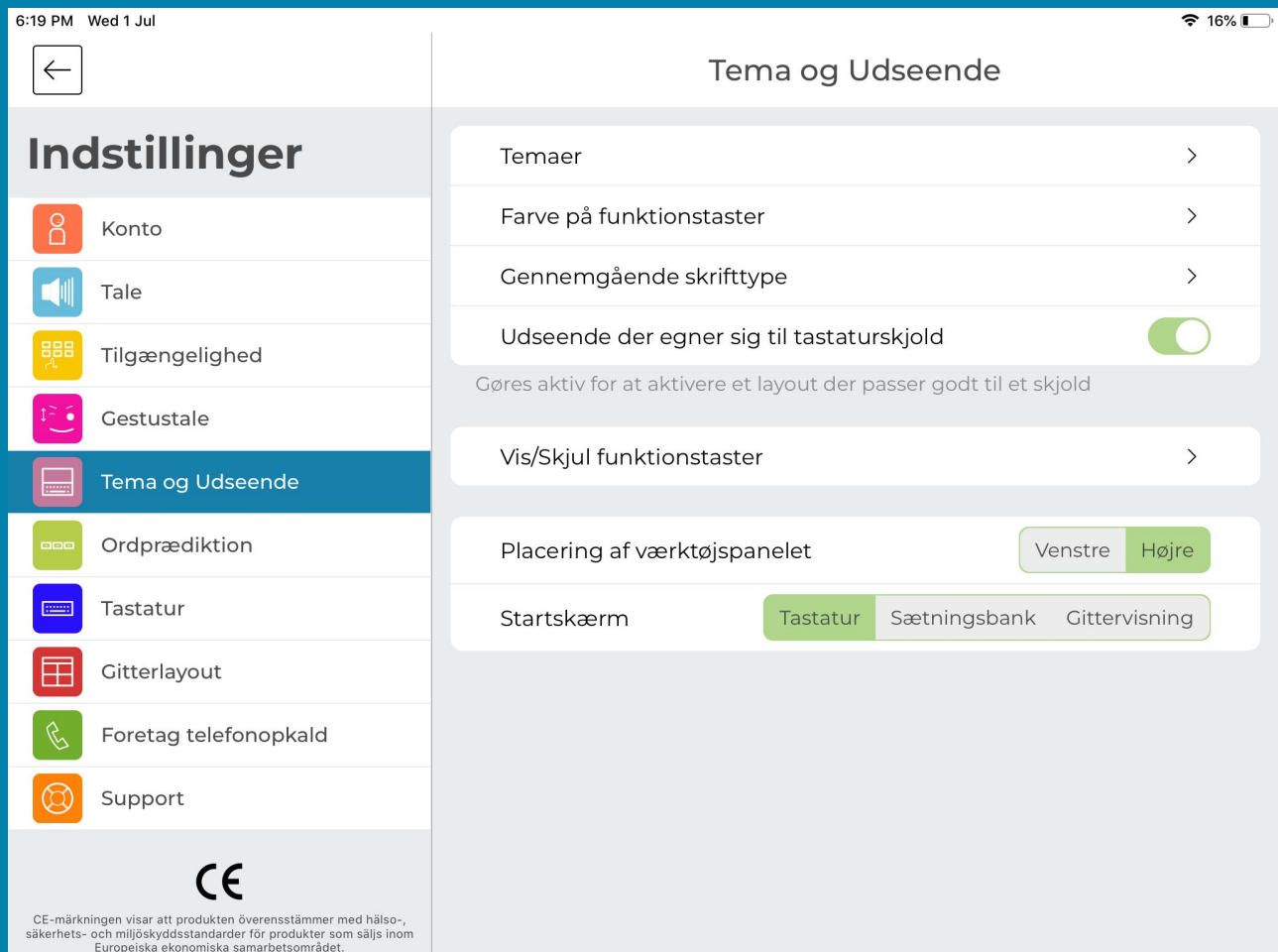

7.1 Temaer

Predictable 6 tilbyder 16 forhåndsdefinerede temaer, der med en række indstillinger i forhold til det visuelle og til betjening fungerer som skabeloner for brugere med forskellige behov. Fra Indstillinger > Tema og Udseende kan du vælge et blandt de 16 forskellige temaer:

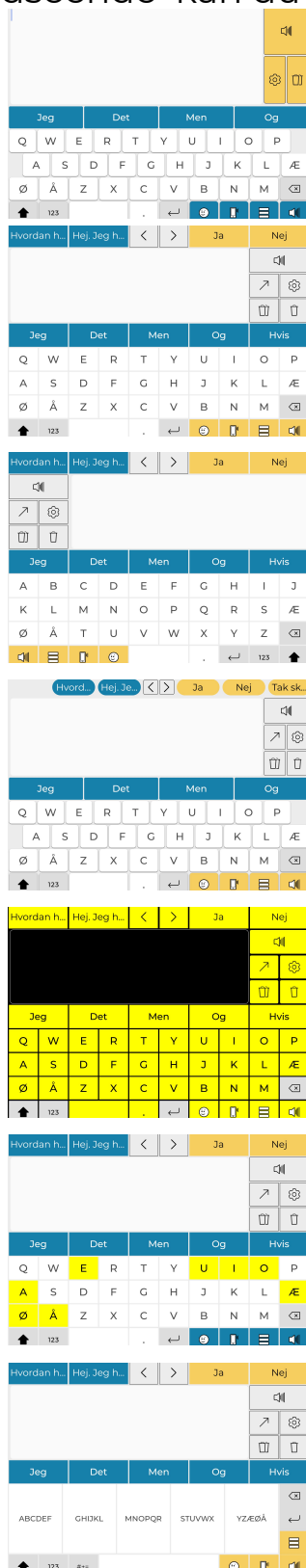

Komme i gang: er den mest skrabede version, som kun har Predictables mest basale funktioner. Dette kan være nyttigt for de, der skal lære Predictable at kende.

Udseende der egner sig til tastaturskjold: denne brugerflade er optimeret til at blive brugt i sammen med et tastaturskjold. Brugerfladen er designet som et 10 X 9 gitter.


Tilpasset venstrehåndede: denne brugerflade er optimeret til at blive brugt med tastaturskjold af venstrehåndede brugere. Brugerfladen er designet som et 10 gange 9 Gitter.

Høj kontrast: Brugerfladen er designet til personer med synsnedsættelse.

Vokal tastatur: Brugerfladen er designet, så der er opmærksomhed på vokalernes placering, og kan eventuelt støtte ved synsvanskeligheder

Ti Taster: bruger et tastatur med kun ti taster som standard.


Gitte - 2x2: startside bliver et gitter med fire felter.

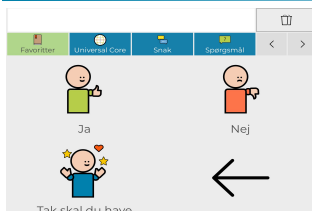


Gritter - 5x4: startsiden bliver et gitter med 20 felter



Tryk hvor som helst: sætter Tryk hvor som helst som standard betjeningsform

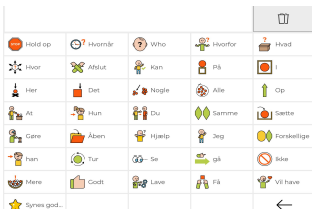


Enkeltkontaktbrug: sætter Enkeltkontaktbrug som standard betjeningsform

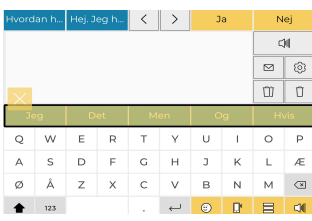


Hovedstyring dwelltid: sætter Hovedstyring som standard betjeningsform med Dwell som aktiveringsmetode





Hovedstyring Blink: sætter Hovedstyring som standard betjeningsform med Blink som aktiveringsmetode

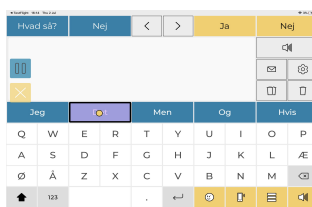

Forbliv i kontakt: optimeret til nem kommunikation med venner og familie ved at sætte Opkald og E-mail som standard taster

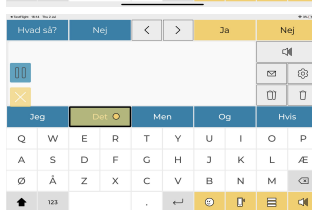

Dysleksi: et farvekode tastatur der søger at støtte de, der har problemer med bogstavsgenkendelse.

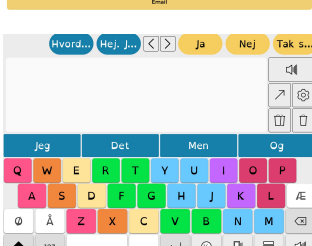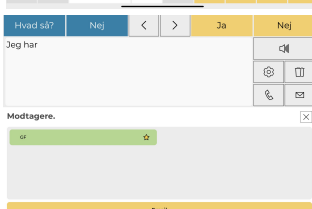

7.2 Visuel Tilpasning

Mens Predictable's temaer giver mulighed for at ændre det samlede udseende og funktioner, kan man også vælge at tilpasse enkelte elementer

Du kan vælge mellem en række forskellige skrifttyper:

Montserrat, Lora, Roboto, OpenDyslexic, Source Serif, Nunito, Open Sans og Lato.

Farver på funktionstaster giver dig mulighed for at tilpasse baggrundsfarve, skriftstørrelse og farve til forskellige elementer i appen. Tabellen herunder viser, hvilke muligheder der er tilgængelige for hver funktion.

Feature	Baggrundsfarve	Skriftfarve	Skriftstørrelse
Historiklinjen	✓	✓	✗
Favoritlinjen	✓	✓	✗
Beskedvinduet	✓	✓	✓
Ordprædiktation	✓	✓	✓
Tastaturets taster	✓	✓	✗
Funktionstaster i toppen	✓	✓	✗
Funktionstaster i bunden	✓	✗	✗
Sætninger	✓	✓	✗
Kategorier	✓	✓	✗
Gitterets Baggrund	✓	✓	✓
Cellers Baggrund	✓	✗	✗

Endelig kan du aktivere eller deaktivere Tastturskjoldegnets visning. Tastaturskjold-brugerfladen er optimeret til at blive brugt sammen med et tastaturskjold, og har et 10 gange 9 gitter..

7.2 Vis/Skjul Funktionstaster

Nogle funktioner bruges mere eller mindre af forskellige brugere. Derfor kan det være nyttigt at skjule funktioner, der ikke bruges, for at reducere antallet af taster på skærmen.

Du har muligheden for at vise eller skjule:

VIS/SKJUL FUNKTIONSTASTER		
1	 Tale-knap	☐ Skjul ☒ Vis
	 Alarm	☒ Skjul ☐ Vis
2	 Del-knappen	☐ Skjul ☒ Vis
3	 Indstillinger	☐ Skjul ☒ Vis
4	 Slet alt	☐ Skjul ☒ Vis
5	 Slet sidste ord	☐ Skjul ☒ Vis
	 Foretag telefonopkald	☒ Skjul ☐ Vis
	 Håndskrift	☒ Skjul ☐ Vis
	 Sætningsbank	☒ Skjul ☐ Vis
	 Gittervisning	☒ Skjul ☐ Vis
	 E-mail	☒ Skjul ☐ Vis

Endelig har du muligheden for at oprette dine egne Alarmlyde. Det gør du ved at trykke på Alarm-knappen i listen Vis / Skjul funktionstaster. Klokken bruges som et signal til at underrette nogen om, at du har brug for hjælp eller anden form for opmærksomhed. Du kan enten tildele din egen unikke optagelse til klokken, eller bruge en af Predictables forhåndsdefinerede lyde.



7.3 Mere om Udseende og Tilpasning

Predictable giver dig også mulighed for at placere funktionstasterne på venstre eller højre side af Meddelelesesvinduet. De kan enten placeres til højre eller venstre for vinduet. Dette er for at give nemmere adgang til tasterne afhængigt af, hvilken hånd man benytter.

Startskærm giver dig mulighed for at vælge, om programmet skal starte op med Tastatur, Sætningsbanken eller i Gittervisning.

8. Ordprædiktion



8.1 Indstillinger for ordforråd

Du har mulighed for at tilpasse funktionaliteten i historikindstillingen. Du kan deaktivere Gem historie for ikke at få vist tidligere udtalte sætninger. Derudover har du muligheden for at rydde din eksisterende historie ved at trykke på Slet al historie.

Derudover kan du tilpasse selvlærte ord 'i afsnittet Administrer selvlærte ord på tre måder:

- 1) Tilføj: du kan tilføje ord til din ordbog.
- 2) Slet: Hvis du ønsker at slette et selvlært ord, muligvis fordi det fejlagtigt er blevet lært, skal du trykke på ordet og derefter vælge sletteikonet i øverste højre hjørne af skærmen
- 3) Rediger: Hvis du ønsker at redigere et selvlært ord, skal du trykke på det og derefter vælge redigeringsikonet i øverste højre hjørne af skærmen.

I Predictable er der nu mulighed for at nulstille indlærte ord. Nulstillingen sletter alle dine selvlærte ord og sletter alle oplysninger om ordbrug og sætningsdannelse.

8.2 Flere tilpasninger af ordprædiktion

Ud over de løbende tilpasninger af prædiktionen tilbyder Predictable også andre måder at tilpasse dine ordprædiktion.

Først og fremmest er der mulighed for at aktivere eller deaktivere Prædiktion. Det fjerner naturligvis det primære formål med Predictable: at gøre skrivning og dermed kommunikationen hurtig og effektiv.

En anden mulighed er at aktivere eller deaktivere autofuldførelse. Når denne funktion er aktiveret, vil det mest oplagte ordforslag optræde med rødt i Meddelesesvinduet. For at vælge det foreslåede ord skal du trykke på mellemrumstasten, hvorved ordet indsættes og det næste foreslås.


Predictable giver også 2 forskellige måder at identificere eller rette stavfejl på:

Autokorrektur: forkert stavede ord korrigeres automatisk.

Stavekontrol: forkert stavede ord er skrevet med rødt.

Endelig kan du justere det antal gange ord og syntaks skal bruges, før de indgår i fremtidige ordforslag. Du har fire muligheder for indlæringsfrekvens: Aldrig, langsom, Medium og hurtig. Det henviser til det antal gange ord og sætninger skal bruges for at indgå i fremtidige forudsigelser. Hurtig er 2 gange, medium 3 gange og langsom er 4 gange.

9. Tastatur

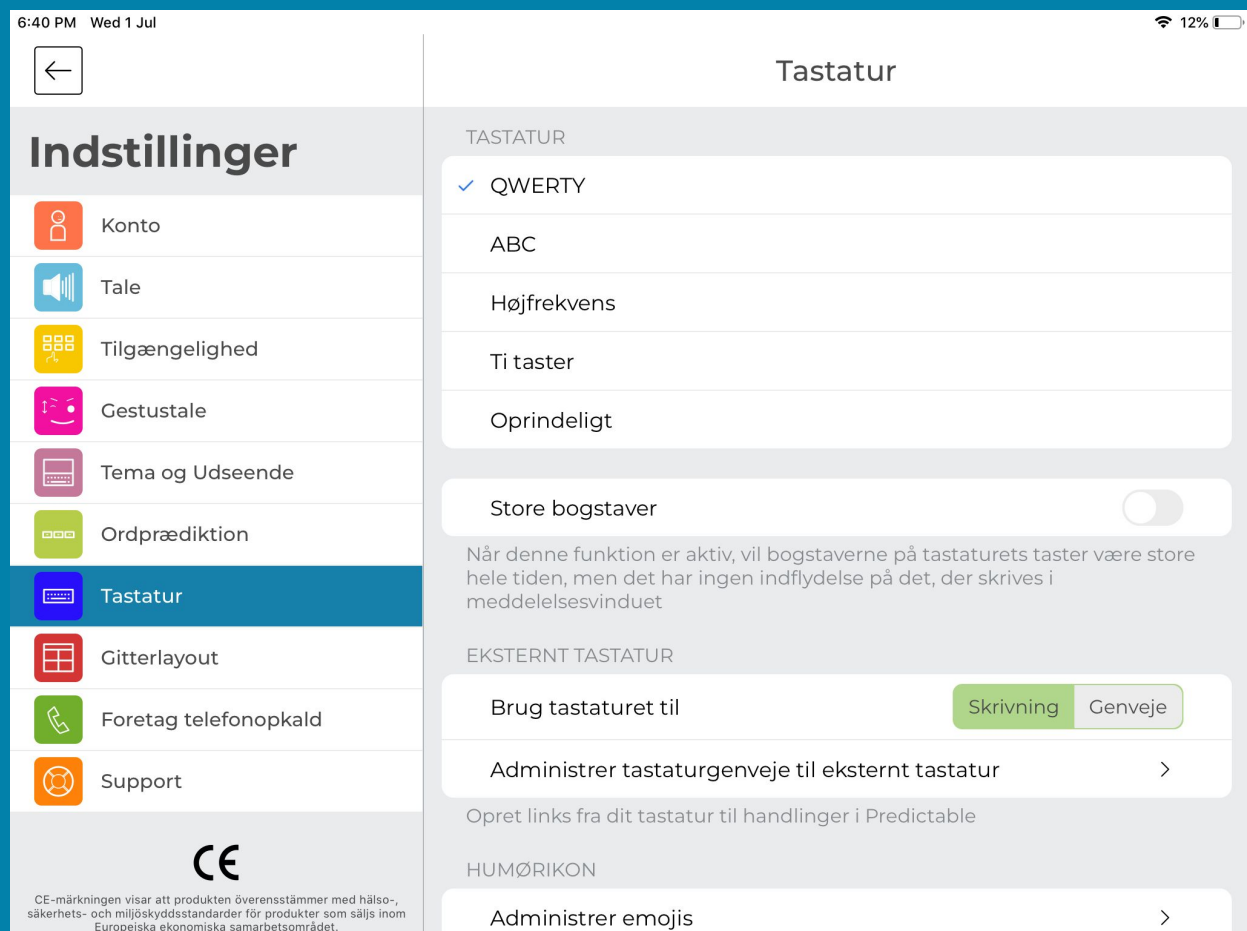

9.1 Tastatur

Predictable har fem muligheder for tastaturlayout. Endvidere giver Predictable dig mulighed for at benytte eksterne tastaturer og tredjeparts tastaturer. De fem indbyggede muligheder er:

Det	Men	Og	Hvis	Så
q	w	e	r	t
a	s	d	f	g
ø	å	z	x	c
123	.	.	.	.

QWERTY

Det er standardtastaturet og minder meget om det helt almindelige tastatur.

Det	Men	Og	Hvis	Så
A	B	C	D	E
K	L	M	N	O
Ø	Å	T	U	V
123	.	.	.	.

ABC

Tasterne er listet i alfabetisk orden.

Det	Men	Og	Hvis	Så
N	T	L	O	K
E	A	R	G	H
D	S	I	M	U
123	.	.	.	.

Højfrekvens

Tasterne er organiseret, så de mest brugte er de første, hvad der blandt andet kan betyde meget for hastigheden ved scanning.

Det	Men	Og	Hvis	Så
ABCDEF	GHIJKL	MNOPQR	STUVWX	YZÆØÅ
123	123	123	123	123

Ti Taster:

Sammenlignet med de andre tastaturer er tasterne meget større. Det kan især være nyttigt for personer med usikre bevægelser. I stedet for individuelle taster for hvert bogstav er bogstaverne grupperet.

For eksempel er ABCDE en gruppering. Når du trykker på den gruppe, du vil bruge, vil tastaturet ændres og vise dig de bogstaver, der er i gruppen. Når du har valgt et bogstav, går man automatisk tilbage til hovedtastaturet).

Det	Men	Og	Hvis	Så
q	w	e	r	t
a	s	d	f	g
z	x	c	v	b
123	.	.	.	.


Oprindeligt

Du kan også vælge at benytte det oprindelige Apple tastatur.

OBS: Det er kun Predictables egne tastaturer, der kan bruges med hovedstyring.

Endvidere kan du aktivere en funktion, der gør, at bogstaverne på Tasterne altid er store bogstaver. Skrivning i meddelelsesvinduet vil fortsat være en vekslen mellem store og små bogstaver som normalt.

9.2 Administrer genveje for eksternt tastatur

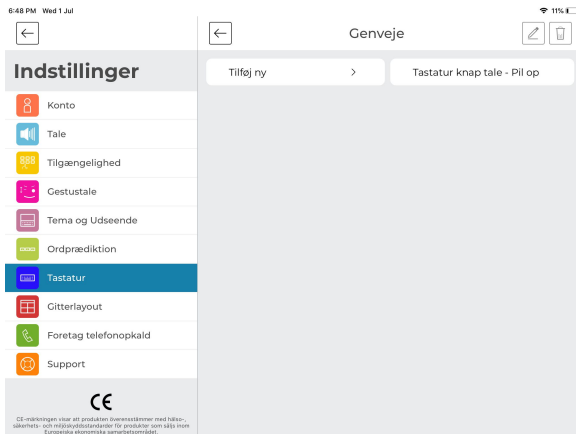

Du har også muligheden for at tilslutte et eksternt Bluetoothtastatur til din enhed. I tastaturindstillingerne har du muligheden for at aktivere genveje fra det eksterne tastatur. Disse genveje er beregnet til at hjælpe dig med at bruge Predictable mere effektivt. Du kan administrere genveje til dit eksterne tastatur på tre måder:

A) Tilføj Genvej

For at tilføje en ny genvej skal du trykke på + -knappen. Du skal dernæst vælge den handling på listen, du ønsker skal udføres, når tasten vælges. Denne genvej udløses, når du trykker på den genvejstast på dit eksterne tastatur.




B) Slet Genvej

Du kan slette en genvej ved at trykke på den og vælge ikonet for slet i højre side af skærmen.

C) Rediger Genvej

Du kan redigere en genvej ved at trykke på den og vælge ikonet for rediger slet i nederste højre side af skærmen.

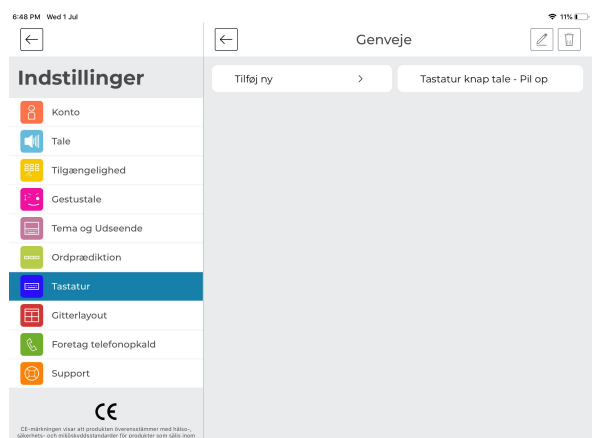

9.3 Administrere Emojis


Predictable 6 tilbyder et stort udvalg af emojis. Du kan bruge disse emojis i dine meddelelser ved at vælge dem fra Emoji-tastaturet i nederste højre hjørne af dit tastatur.

Du kan tilpasse dine emojis i afsnittet Tastatur under Indstillinger. For at gøre dette skal du vælge den Emoji, du vil redigere, og derefter trykke på blyantikonet i øverste højre hjørne. Der er to måder, hvorpå du kan tilpasse dine emojis:

- A. **Emoji-navn:** Du kan redigere emoji-navnet. Hvis du vælger indstillingen Tekst til tale til emojis-lyden, læses dette navn, når du bruger denne emoji i en meddelelse.
- B. **Lyd knyttet til Emoji:** der er tre forskellige typer lyd, du kan tildele dine emoji:
 - 1) Optag din egen lyd til emoji'erne. For at gøre dette, skal du trykke på knappen 'Ny optagelse', optage lyden, tildele den optagede lyd et Visningsnavn> og derefter trykke på tjek-ikonet for at gemme optagelsen.
 - 2) Tildel en af de allerede optagede lyde til emoji'erne. Predictable har 8 forskellige indspillede lyde til følelser og er tilgængelige med både mande- og kvindestemme.
 - 3) Tekst til tale læser emoji'ens navn, når du bruger emojis i en talt besked. For at vælge denne funktion skal du trykke på knappen med X.



10. Gittervisning

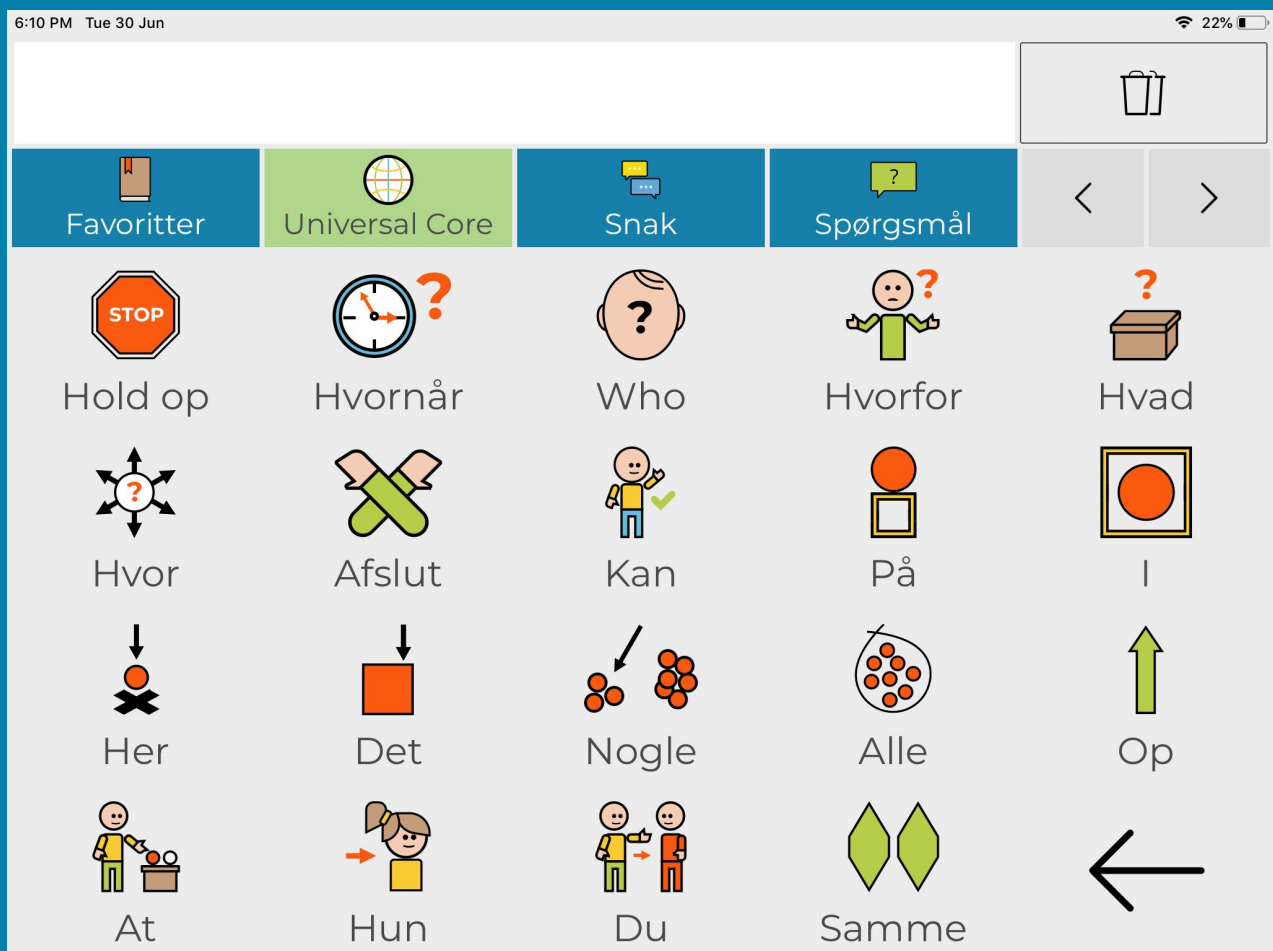

Gittervisningen viser dig dine kategorier og sætninger i en traditionel gittervisning. En sådan layout er optimeret til de forskellige scanningsmetoder og til brugere, der har behov for symboler til understøttelse af kommunikationen.

Der er to muligheder for at tilgå Gittervisning:


1. Sæt Gittervisning som din startskærm: Hvis du gerne vil kommunikere primært fra Gittersiden, kan den indstilles til at være din statside. Gå til Indstillinger> Tema og udseende> Rul til bunden> Vælg Gittervisning som din standard startskærm.

2. Fra Brugervisning: Du kan også få adgang til gittervisning i brugervisning. Det gør du ved at trykke på ikonet for Sætningsbank > Tryk på ikonet for Gittervisning (findes direkte under redigeringsknappen).

Du kan også tilpasse udseendet på din gittervisning. Du kan ændre antallet af kolonner og rækker.

Desuden har du mulighed for i afsnittet om udseende at redigere skriftstørrelse og farve samt baggrundsfarve. Du har også mulighed for at vise / skjule ikonerne for både kategorier og sætninger.

11. Opkald

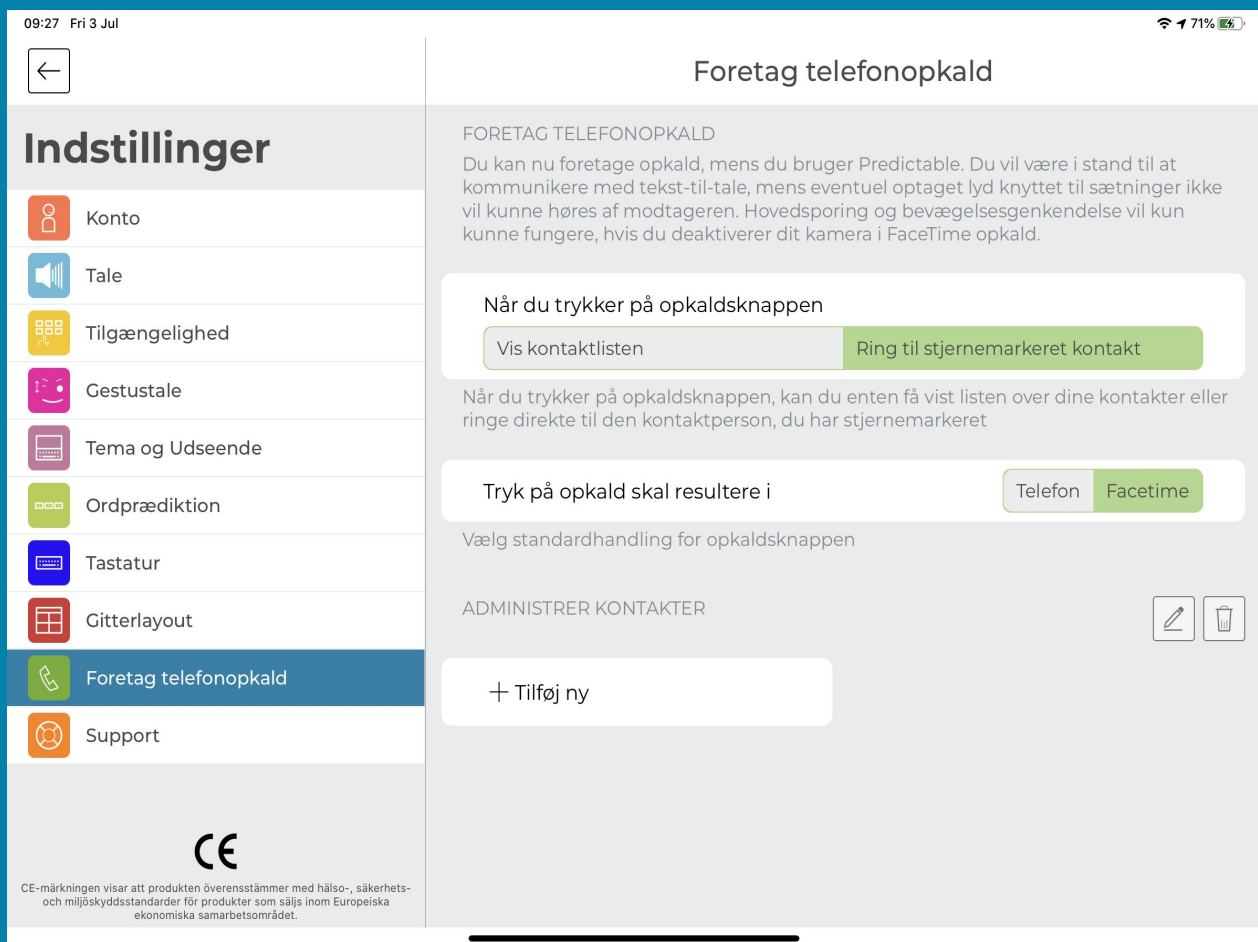


11.1. Hvordan foretager og modtager man opkald, administration af kontaktliste

En ny funktion i Predictable 6 er muligheden for at foretage og modtage opkald. Du kan også bruge Facetime. Det er vigtigt at bemærke, at du kun kan bruge enhedstemmer til opkald. Hvis du bruger Acapela My Own Voice, bliver du nødt til at vælge den enhedsstemme i afsnittet Opkald, der skal bruges til opkaldet.

Før du kan foretage et opkald, skal du tilføje modtagere til din kontaktliste. Tryk på tilføj ny, og skriv navn og nummer på den kontakt, du vil tilføje. Du kan også tilføje en persons e-mail adresse, hvis den adresse benyttes til Facetime. Tryk på Gem, når du er tilfreds med de oplysninger, du har indtastet. Du kan redigere og slette dine kontakter.

Du har to muligheder for, hvad der skal ske, når du trykker på opkaldeknappen: Vis kontaktliste eller Kontakt stjernemarkeret. For visning af kontaktliste vises alle de kontakter, du har tilføjet, når du trykker på opkaldeknappen i brugertilstand. Du kan derefter vælge mellem disse indstillinger, hvem du ønsker at ringe til. Stjernemarkeret kontakt fungerer lidt anderledes. I Opkaldsindstillinger kan du stjernemarkere en kontaktperson. Når du trykker på opkaldeknappen, vil det være denne person, der kontaktes.

Det er vigtigt at vide, at du forlader Predictable, når du trykker på opkaldeknappen. Det medfører, at de alternative betjeningsformer du bruger i Predictable ikke vil være tilgængelige, før du igen går ind i appen. For at bruge Predictable til at tale, bliver du nødt til at navigere fra opkaldet tilbage til Predictable.

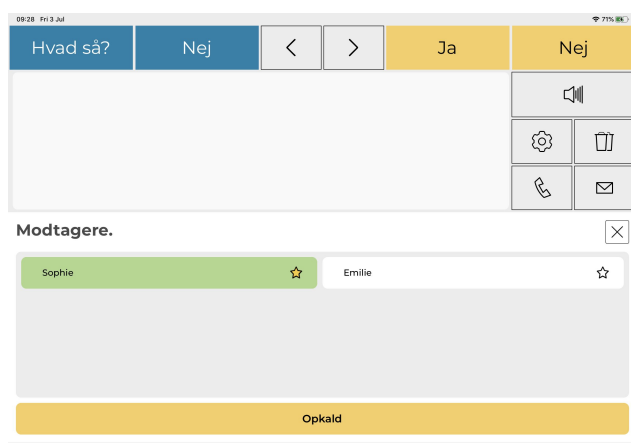

12. Gestustale

12.1. Hvorfor og hvornår bruges Gestustale, administrer handlinger

Gestustale er en ny funktion i Predictable 6. Gestustale tilbyder en mulighed for at tildele en talt sætning eller en handling til en mimisk bevægelse.. For eksempel kan Tunge Ud tildeles sætningen 'Hvordan har du det?' Hvis man som bruger nu stikker tungen ud af munden, vil det resulterer i at sætningen 'Hvordan har du det?' bliver udtalt. Formålet med denne nye funktion er at øge hastigheden af kommunikationen. Brug af en af disse mimiske bevægelser kan være meget hurtigere end at skulle skrive meddelelsen ved hjælp af tastatur.


Du kan også linke en mimik til at udføre en handling. For eksempel kan du linke et blink til at udtale den sætning, der står i meddelelsesvinduet.

Der er tre måder, du kan administrere dine Gestustale handlinger:

- 1) **Tilføj:** Gå til afsnittet Gestustale i indstillinger. Tryk på Tilføj Ny. På den side vil du have muligheden for at vælge, om du vil udføre en handling eller udtale en sætning fra en kategori. Hvis du vælger handling, vil alle de mulige funktionstaster blive vist. Hvis du vælger tal sætning fra kategori, vil du blive vist alle dine kategorier med tilhørende sætninger. Efter du har valgt den ønskede handling eller sætning, kan du vælge den mimik der skal fungerer som udløser. Når du er færdig, skal du trykke på bekræft. Hvis du allerede benytter en mimik som valgfunktion ved betjening, kan den ikke også fungere i Gestustale.
- 2) **Rediger:** For at redigere en Gesustale skal du trykke på rediger eller slet din gestustale.

For at øge antallet af tilgængelige Gestustale muligheder, har vi introduceret muligheden for at oprette 'Opskrifter'. Opskrifter er, at du kombinerer flere forskellige mimikker for at aktivere handlingen eller talen.. F.eks. kunne Blink, Tungen ud og Rynket Pande tildeles 'Hvem er det?', Mens Blink, Rynket Pande og Tungen Ud kunne knyttes til 'Det er dejligt at se dig'.



13. Support

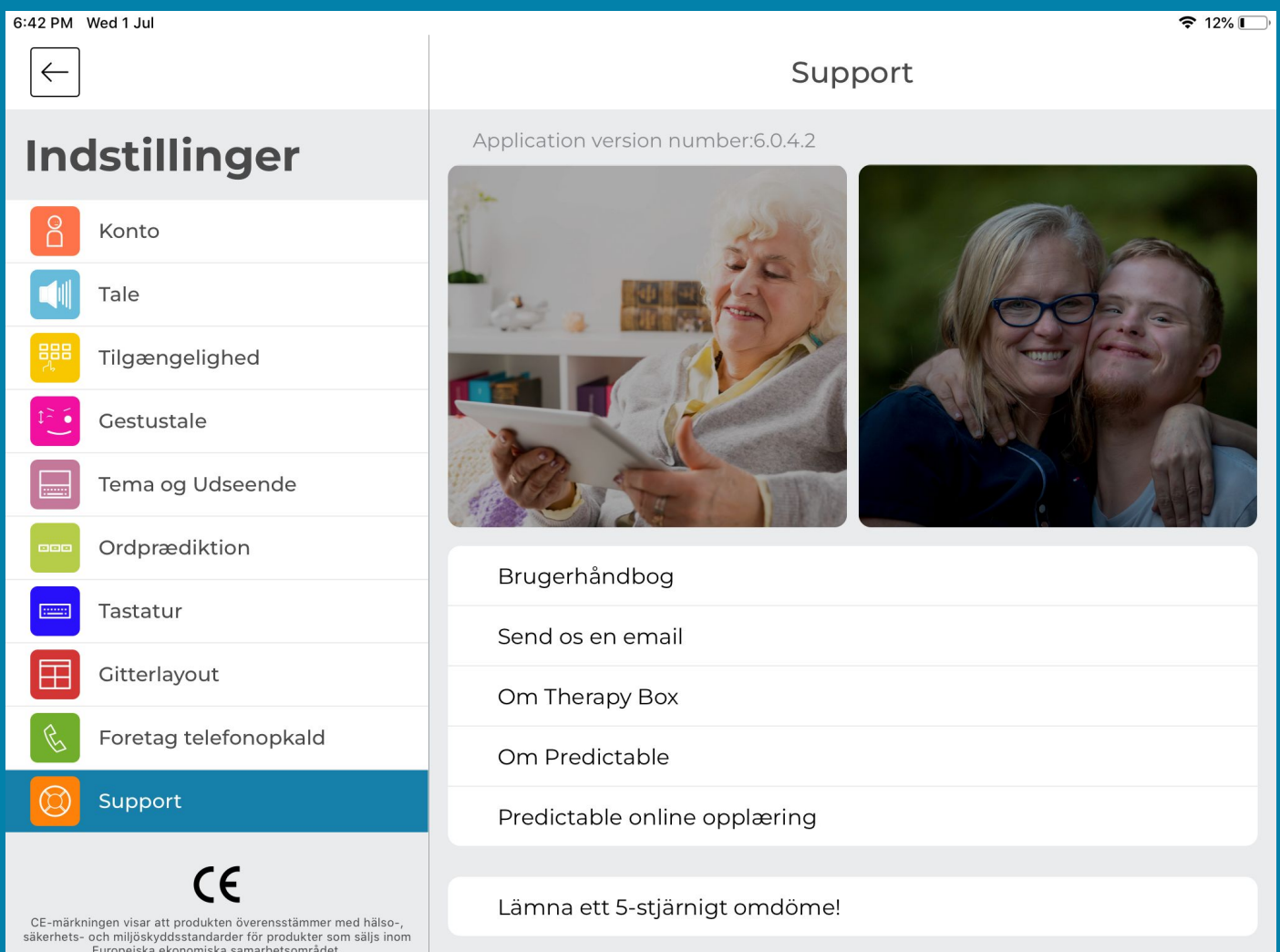

13.1. Problemløs ved at sende os en e-mail eller se vores video guides

Dette afsnit indeholder Youtube Video instruktioner, der har til formål at vise dig, hvordan du bruger Predictables funktioner. Der er både et link til denne brugervejledning og muligheden for at e-maile vores supportteam, hvis du har andre ubesvarede spørgsmål.


Derudover kan du i bunden af Support-sektionen under Indstillinger finde et antal videoguides, der tilbyder instruktionsvideoer om, hvordan du effektivt bruger alle Predictables funktioner.

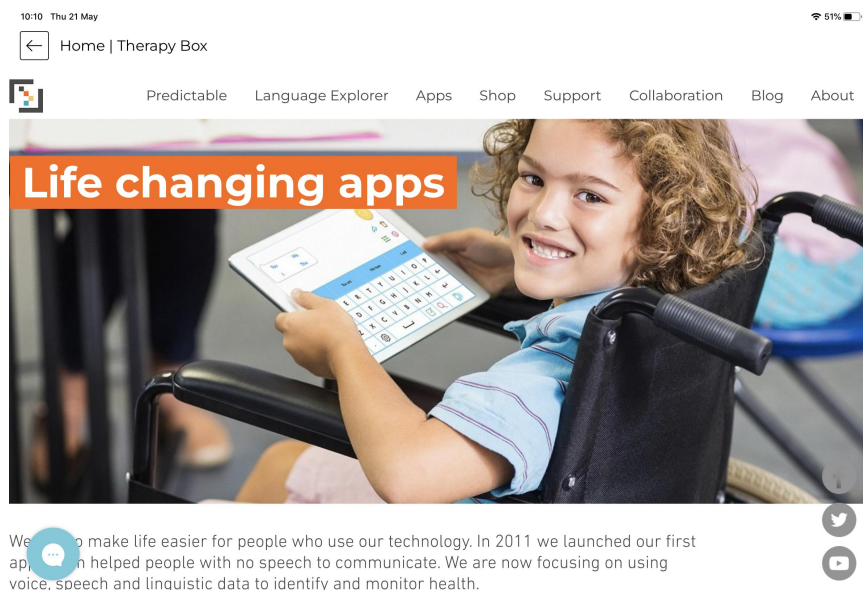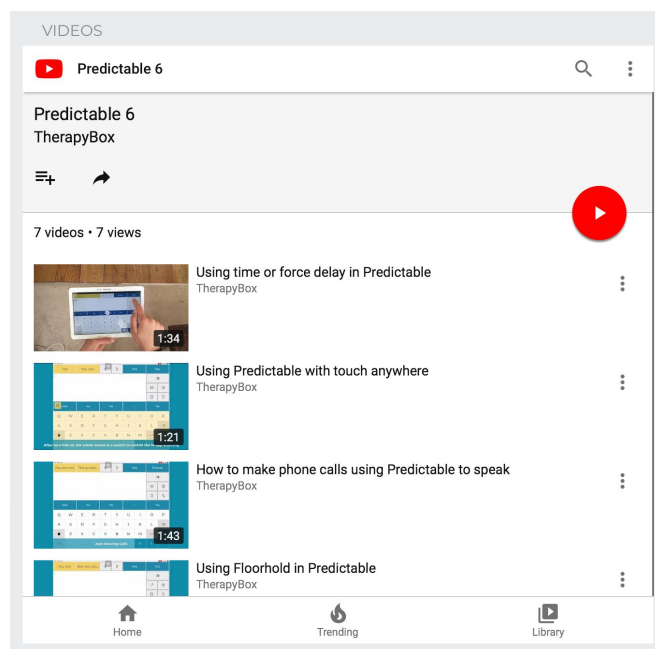

14. Web Platform

14.1. Tilpas din sætningsbank og download kategorier og sætninger

Fra Therapy Box'-hjemmeside har du muligheden for at logge ind på webplatformen med dit brugernavn og adgangskode. Webplatformen giver mulighed for at administrere din Predictable konto fra din computer. Du kan justere indstillinger, uploade indhold og slette uønskede filer. Ændringer, der er foretaget på webplatformen, vil også med det samme blive kunne ses i appen på din enhed. Denne funktion er også nyttig, hvis en bruger ændrer en indstilling ved et uheld. Det giver andre som for eksempel en talepædagog, et familiemedlem eller Therapy Box supportteam mulighed for at foretage fiernbetjeningen

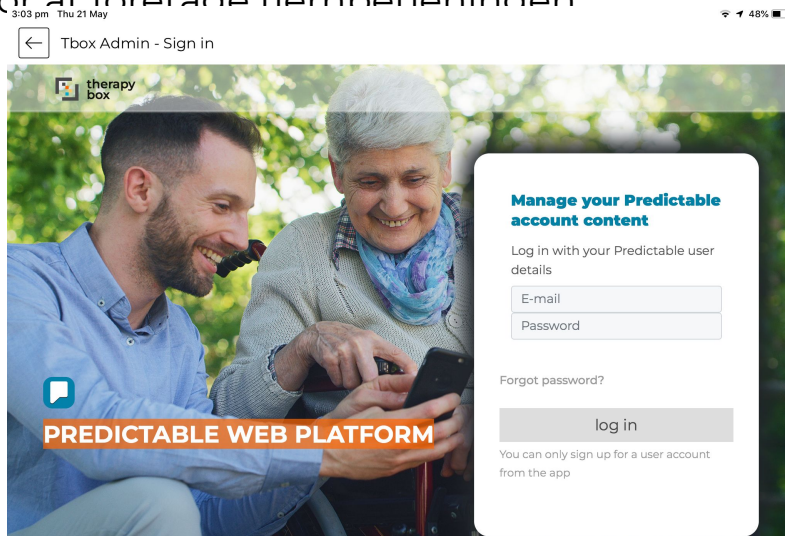

therapy box					
PHRASE BANK		DRAFT PHRASES	AUDIO	IMAGES	PROFILE
Manage your phrase bank content. Edit your phrases, attach sounds, images and multimedia links. Select + to add items or tap the existing assets to replace or remove them.					
		Download selected (0)	Delete selected (0)	Restore phrase bank to default	
Category	Spoken phrase	Display phrase	Image	Audio	Multimedia
+ Add category					
☐ Universal Core					
☐ Family					
+ Add phrase					
☐	This is my dad	This is my dad		+	Paste a multimedia link
☐	This is my wife	This is my wife		+	Paste a multimedia link
☐	This is my husband	This is my husband		+	Paste a multimedia link
☐	This is my mum	This is my mum		+	Paste a multimedia link
☐	This is my child	This is my child		+	Paste a multimedia link

Sætningsbanken på web platformen giver mulighed for overblik. Du kan:

1. Let søge efter dine sætninger: Når du trykker på en række, ordnes filerne i kolonnen alfabetisk. Du kan også søge efter filen ved at indtaste enten lydfilnavnet, den talte sætning, visningsteksten eller kategorienavn.
2. Slet indhold: Vælg kategorier og sætninger, og tryk på "Slet valgt". Du kan også slette dem en efter en ved at trykke på sletteikonet for hver sætning.
3. Rediger dit indhold i sætningsbanken: Hvis du klikker på kategorinavnet, vises sætningens navn eller det talte sætningsnavn, og du kan redigere navnet.
4. Redigere de billeder, der er knyttet til dine sætninger:
5. Tilføj et nyt billede: Tryk på "+" -ikonet, og vælg det billede, du gerne vil hæfte til sætningen.
6. Ændring af det vedhæftede billede: Ved at trykke på det billede, der er knyttet til en sætning, kan du vælge, om du vil erstatte det eller fjerne det.
7. Hvis du har brug for at redigere lydene, der er knyttet til dine sætninger:
8. Tilføjelse af en ny lyd: Tryk på knappen "+", og vælg den lyd, du gerne vil hæfte til sætningen.
9. Ændring af den vedhæftede lyd: Ved at trykke på lyden, der er knyttet til en sætning, kan du vælge at udskifte den eller fjerne den.
10. Vedhæft et multimedielink: Du kan indsætte et weblink i tekstboksen. Hvis du har brug for at slette multimediet, skal du blot slette linket i CMS.

Du kan også downloade kategorier og sætninger for at uploade dem til en anden Predictable konto. På denne måde kan du oprette kategorier, som du ønsker at dele med andre

14.3. Importere MyMessageBanking indhold


Fra afsnittet “Udkast til sætninger” kan du uploade forudfremstillede sætninger fra 2 kilder: Predictable og myMessageBanking.

myMessageBanking.com er en gratis service, der tilbydes af Boston Children's Hospital Department of Otolaryngology og Tobii Dynavox med et mål at skabe en gratis og åben meddelelsesbank til personer, der risikerer at miste deres stemme.

Systemet vil guide dig gennem den proces, der muliggør, at du kan bruge meddelelsesbanken, hjælpe med at organisere meddelelserne, gemme meddelelserne og give måder at downloade beskederne til brug på ethvert system, der kan afspille disse meddelelser. Brug af systemet, lagring af beskeder og download af gemte meddelelser er gratis til personlig brug.

Hvordan bruger du tjemesten med Predictables web platform

myMessageBanking indhold er kompatibel med Predictable. Det betyder, at du kan uploade de sætninger, som du har gemt og transkriberet med myMessageBanking.com til din Predictable konto, så de kan blive sætninger i din sætningsbank.

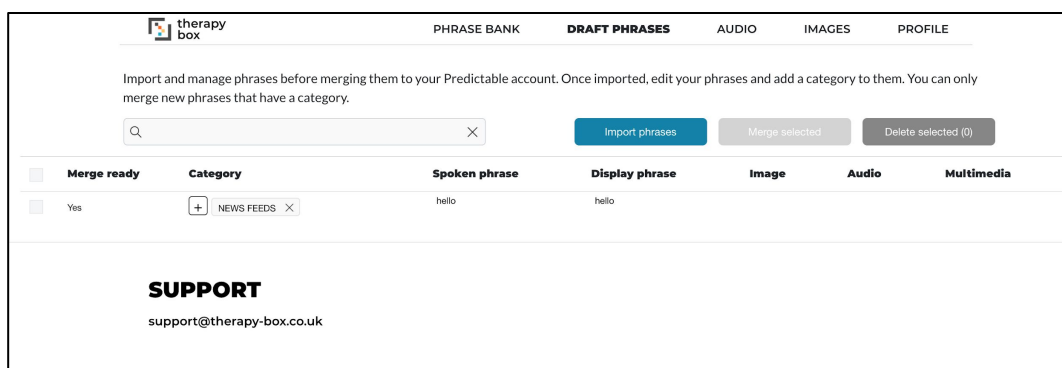

The screenshot shows the 'DRAFT PHRASES' section of the Predictable web platform. At the top, there are tabs for 'PHRASE BANK', 'DRAFT PHRASES', 'AUDIO', 'IMAGES', and 'PROFILE'. Below the tabs, there is a text instruction: 'Import and manage phrases before merging them to your Predictable account. Once imported, edit your phrases and add a category to them. You can only merge new phrases that have a category.' Below this is a search bar and three buttons: 'Import phrases', 'Merge selected', and 'Delete selected (0)'. A table below shows a list of phrases with columns: 'Merge ready', 'Category', 'Spoken phrase', 'Display phrase', 'Image', 'Audio', and 'Multimedia'. The first row shows 'Yes' for 'Merge ready', 'NEWS FEEDS' for 'Category', and 'hello' for both 'Spoken phrase' and 'Display phrase'. At the bottom, there is a 'SUPPORT' section with the email 'support@therapy-box.co.uk'.

Merge ready	Category	Spoken phrase	Display phrase	Image	Audio	Multimedia
Yes	NEWS FEEDS	hello	hello			

SUPPORT
support@therapy-box.co.uk



For at gøre det skal du::

1. Download de lydfiles, du vil bruge i Predictable, fra din myMessageBanking-konto
2. Upload .zip-mappen til afsnittet Udkast til sætninger på Predictables webplatform, transkriptionerne bliver dine talte sætninger og markeringerne bliver til kategorier.
3. Du kan stadig foretage nogle ændringer, før du tilføjer dem dine nye sætninger til din Predictable konto
4. Tryk derefter på Flet

Nogle vigtige pointer:

- Du vil også være i stand til at redigere dine nye sætninger i Sætningsbank-sektionen, hvis du skifter mening efter at have flettet.
- Hvis du har flere mærkater til den samme sætning i afsnittet Udkast til sætninger, tilføjes din sætning til forskellige kategorier. For at tilføje en ny mærkat skal du trykke på “+” -knappen, du kan også slette det ved at trykke på x.
- I afsnittet Udkast til sætninger kan du også uploade kategorier og sætninger, der er blevet downloadet fra en anden Predictable konto. På den måde kan du dele effektive og nyttige kategorier med andre.

14.4. Administrer dine lydfiler og dine billeder

Lyd- og billedafsnittene på webplatformen giver dig mulighed for at lave en oversigt og redigere din liste over lyd- eller billedfiler. Herfra kan du:

1. Enkel søgning efter dine filer: Når du trykker på en søjles titel (titel, kilde), ordnes filerne i kolonnen alfabetisk. Du kan også søge efter filen ved at skrive titlen.
2. Slet indhold: Vælg de filer, du vil slette, og tryk derefter på "Slet valgte". Du kan også slette filer én efter én ved at trykke på sletteikonet for hver fil.
3. Rediger titlen, der er knyttet til dine filer: Ved at klikke på filens titel får du en tekstboks til at udvide sig, så du kan redigere den.
4. Alle de filer, der er uploadet til dette afsnit, vises i din app, når du redigerer en sætning og vælger en lydfil, der skal vedhæftes den:
5. - Importer en lydfil fra din computer: Hvis du vil importere en lydfil, skal du trykke på knappen Importer, derefter trykke på Gennemse, vælge den fil, du tidligere har gemt på din computer, og vælg Upload.
6. - Optag en lydfil fra din computer: For at optage en lydfil fra CMS skal du trykke på Optag, og vælg derefter mikrofonikonet. Når du stopper optagelsen, kan du pause, genoptage og gemme filen, skriv en titel og trykke på Gem



PHRASE BANK

DRAFT PHRASES

AUDIO

IMAGES

PROFILE

Import, record and manage the audio files of your Predictable library. Tap play to listen to them and edit their display names if needed. Please note that you cannot delete audio files that are attached to your phrases.

Import audio

Record audio

Delete selected (0)

☐	Display name	Source	Date	Sound	In use
☐	jhjk	Computer	14 May 2020	00:02 ▶	No
	Cough Male	PA library		00:02 ▶	No
	Cough Female	PA library		00:01 ▶	No
	Laugh Male	PA library		00:01 ▶	No
	Laugh Female	PA library		00:04 ▶	No
	Kiss Male	PA library		00:01 ▶	No
	Kiss Female	PA library		00:01 ▶	No